

Monitoring avec le capteur néonatal

REMARQUE : LE CAPTEUR NEONATAL NIRSENSOR EST UN CAPTEUR À USAGE UNIQUE AVEC UN CÂBLE LE RACCORDANT DIRECTEMENT AU PRÉAMPLIFICATEUR. IL N'Y A PAS DE CÂBLE REUTILISABLE DANS CETTE CONFIGURATION.

Brancher le câble du capteur dans le raccord du préamplificateur. Accrocher le câble du capteur à un objet fixe pour éviter toute contrainte sur la zone de contact entre le capteur et la peau à l'aide de clips de retenue. Vérifier que le câble est bien enfoncé dans le préamplificateur. L'étalonnage est automatique et le monitoring démarre au bout de quelques secondes.

Des messages d'état du système INVOS s'affichent en cas de problème relatif aux conditions de monitoring.

Entretien et dépose du capteur néonatal

Bien que le Sensor soit un élément à usage unique, il devra être traité avec précautions pour éviter des dégâts ou une corruption des données.

Pour retirer le capteur du préamplificateur, saisir les raccords du câble du capteur tout en tirant vers l'extérieur. . Ne jamais tirer sur les câbles. Éviter de déformer ou de tordre le câble de capteur.

PRÉCAUTION : PRENEZ DES PRÉCAUTIONS POUR ENLEVER LE CAPTEUR DU PATIENT. EN CAS DE DIFFICULTÉ POUR L'ENLEVER, SUIVRE LE PROTOCOLE DE SOINS DE L'ÉTABLISSEMENT POUR NE PAS PROVOQUER DES LÉSIONS SUR LA PEAU DU PATIENT.