

Nettoyage

Nettoyer le câble en l'essuyant avec de l'isopropanol.

AVERTISSEMENTS

1. Examiner le câble avant utilisation. Ne pas utiliser un câble endommagé ou dont les fils sont dénudés.
2. Ne pas connecter le MC-10 sur un moniteur non conçu pour être utilisé avec le MC-10. En effet, cela pourrait générer une interférence ou une susceptibilité électromagnétique vers ou depuis d'autres appareils dans l'environnement du patient.
3. Comme pour tout matériel médical, mettre soigneusement en place le câblage afin d'éviter tout risque éventuel d'emmêlement ou de strangulation chez le patient.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. Ne pas stériliser. Ce câble n'est pas conçu pour être stérilisé, y compris par irradiation ou exposition à de la vapeur ou de l'oxyde d'éthylène. Ne jamais immerger le câble dans de l'eau, des solutions désinfectantes ou des solutions de nettoyage. Cela risquerait d'endommager le câble.
2. Une interférence électrochirurgicale pourrait compromettre les performances.
3. Lors de la déconnexion du câble du moniteur, toujours actionner les boutons situés des deux côtés du connecteur au moment de son retrait de la prise du moniteur. Dans le cas contraire, la prise du moniteur ou le connecteur du câble pourrait s'en trouver endommagé.
4. Pour éviter d'endommager le MC-10, saisir le connecteur et non le câble lors de la déconnexion de ce dernier du capteur ou du moniteur.
5. Vérifier les connexions des câbles. Une connexion incorrecte des prises entraînerait des valeurs intermittentes ou aucune valeur du tout.