

## Mode d'emploi

### Description

Les brassards à tension réutilisables *Nellcor Symphony*, modèles SCBP, doivent être utilisés uniquement avec des moniteurs de pression artérielle *Nellcor* dont les manuels d'utilisation spécifient l'emploi de brassards SCBP et avec le tuyau de pression artérielle *Nellcor Symphony*, modèle SHBP-10, pour mesurer la pression artérielle du patient.

### Instructions d'utilisation

- 1) Sélectionnez un brassard adapté à la taille du patient. Pour ce faire, reportez-vous au tableau ci-dessous. En règle générale, la largeur du brassard doit couvrir les deux tiers environ de la distance séparant le coude de l'épaule du patient.

Les brassards réutilisables SCBP sont disponibles auprès de Mallinckrodt dans les tailles suivantes :

Brassards SCBP réutilisables	
Nom du modèle Largeur de la vessie	Circonférence du membre (cuisse ou bras)
SCBP-6R nourrisson 6 cm	10-19 cm
SCBP-9R enfant/ adulte de petite taille 9 cm	18-26 cm
SCBP-12R adulte 12 cm	25-35 cm
SCBP-15R 15 cm	33-47 cm
SCBP-18R cuisse 18 cm	46-66 cm

- 2) Déballez le brassard. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé avant de l'utiliser. N'utilisez pas de brassard qui ne serait pas en parfait état.
- 3) Connectez une extrémité du tuyau SHBP-10 au connecteur du moniteur conformément aux instructions d'utilisation du SHBP-10.
- 4) Pour connecter le tuyau au brassard, alignez les deux connecteurs et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" .
- 5) Evacuez la totalité de l'air du brassard et enroulez-le autour du bras du patient. Dans le cas d'adultes et d'enfants, le bras constitue l'emplacement le plus recommandé. Si le bras ne peut être utilisé, il est préférable de se servir de la cheville plutôt que de la cuisse, la mesure sur la cuisse de l'adulte étant assez inconfortable.
- 6) Positionnez le brassard de telle sorte que le symbole  se trouve directement sur l'artère du patient . La tension du brassard enroulé doit être telle que l'on puisse insérer deux doigts seulement entre le bras et le brassard. Si le brassard est enroulé de manière trop lâche, des erreurs peuvent se produire lors de la mesure.

Remarque : les brassards à tension *Nellcor* sont munis d'une flèche bi-directionnelle entre deux lignes pour indiquer la taille correcte. Si, lorsque le brassard est enroulé autour du bras du patient, la ligne repère  (a) n'est pas comprise entre les deux lignes indiquant la taille, vous devez sélectionner une taille de brassard plus grande ou plus petite.

### Retrait/Nettoyage

Pour retirer le brassard du tuyau, saisissez le connecteur du tuyau et tirez vers l'arrière l'anneau métallique extérieur situé sur l'extrémité du connecteur .

Les brassards sont destinés à être réutilisés et peuvent être nettoyés en surface en les frottant avec un produit désinfectant contenant 70% d'alcool isopropylique.

### Avertissements

- 1) Le brassard doit se trouver au même niveau que le cœur pour assurer la précision des mesures. Ainsi, le moniteur affiche des valeurs inférieures à la pression artérielle réelle si le brassard est placé plus haut que le cœur et des valeurs supérieures à la pression artérielle réelle si le brassard est placé plus bas que le cœur.
- 2) N'exercez pas de pression externe sur le brassard car cela pourrait provoquer une inexactitude des mesures.
- 3) Comme cela se produit avec tous les appareils à gonflage automatique, des mesures fréquentes à l'aide du brassard peuvent endommager les tissus. Évaluez les avantages que représentent des mesures répétées et/ou utilisez le mode STAT pour prévenir le risque d'un tel dommage.
- 4) Dans certains cas, on a associé un cycle rapide et prolongé de monitoring de la pression artérielle non invasive à une ischémie, un purpura et/ou une neuropathie. Vous devez donc veiller à appliquer le brassard conformément aux instructions et vérifier régulièrement l'emplacement du brassard ainsi que le membre porteur du brassard lorsque vous effectuez un monitoring à intervalles fréquents et/ou pendant des laps de temps prolongés.
- 5) Ne placez pas le brassard sur un membre utilisé pour une perfusion intraveineuse ou à un endroit compromettant ou pouvant compromettre la circulation.

Remarque : reportez-vous au Manuel d'utilisation du moniteur pour une description détaillée concernant l'utilisation du brassard avec le moniteur.

### Garantie

Pour obtenir les informations relatives à la garantie éventuelle couvrant ce produit, contactez le Service technique de Mallinckrodt ou votre représentant Mallinckrodt local.

**Attention : la législation fédérale américaine réserve la vente de ce produit aux médecins, ou sur prescription médicale.**

Fabriqué par W.A Baum Co, Inc.  
Distribué par Mallinckrodt Inc., Pleasanton, CA  
et Mallinckrodt Europe BV, Hertogenbosch,  
Pays-Bas.

*Nellcor Symphony* est une marque commerciale de Mallinckrodt Inc. © 1999 Mallinckrodt Inc.  
Tous droits réservés.