



Solutions topiques compatibles avec la V.A.C. VeraFlo™ Therapy *

Solution	Catégorie / Indication	Dénomination commerciale	Considérations cliniques pour utilisation en mode V.A.C. VeraFlo™ Therapy
Sérum physiologique 0,09%	Solution isotonique Lavage, rinçage ou humidification des plaies		L'utilisation de solutions salines hypertoniques n'est pas recommandée pour l'irrigation des plaies.
Solution halogénée	Agent antimicrobien Nettoyage des plaies	Dakin®	Cette solution ne doit pas être utilisée à des concentrations > 0,125%. Lors de son utilisation, minimiser le nombre de cycles d'irrigation et le temps de contact, en accord avec les recommandations cliniques.
Solution de nitrate d'argent	Agent antimicrobien Action antimicrobienne et antifongique		Concentration la plus utilisée : 0,5%. Le nitrate d'argent est photosensible ! Protéger les tubulures d'instillation VeraLink™ de la lumière durant l'utilisation.
Solutions cationiques (chlorure de benzalkonium / Octenidine)	Agents antiseptiques	Octenilin®	Ces instillats possèdent une faible toxicité topique et systémique, mais ils peuvent générer des irritations/brûlures en utilisation conjointe avec des pansements occlusifs. Elles sont inactivées par les savons et les détergents anioniques.
Solution de polyhexanide	Agent antiseptique cutané Nettoyage des plaies. Permet le maintien d'une bonne humidification des pansements absorbants dans une plaie (ulcères, brûlures,...).	Prontosan®	En raison du risque d'obstruction des tubulures, l'utilisation de la base de préparation en gel, est à proscrire.
Solution Ringer lactate 28 mM	Solution isotonique Lavage, rinçage ou humidification des plaies		Cette solution est à utiliser avec précaution chez les patients porteurs de plaies étendues et/ou avec une alcalose établie (pH > 7,4) ou une insuffisance hépatique sévère.

La cicatrisation des plaies sur mesure



Le système de thérapie V.A.C. Ultra™ est compatible avec de nombreuses solutions topiques afin de répondre aux besoins de toutes les plaies.



Solutions topiques & V.A.C. VeraFlo™ Therapy

Recommandations

La V.A.C. VeraFlo™ Therapy est conçue pour être utilisée avec les consommables V.A.C. VeraFlo™ et les solutions topiques pour le traitement des plaies.

Utiliser uniquement des suspensions et solutions qui sont :

- Indiquées pour le traitement topique des plaies dans les indications d'utilisation fournies par le fabricant. Certains agents topiques ne sont pas destinés à un contact prolongé avec les tissus. Si vous vous interrogez sur la possibilité d'utiliser une solution précise pour la V.A.C. VeraFlo™ Therapy, prenez contact avec le fabricant de cette solution pour savoir si elle est adaptée à une exposition topique prolongée avec une plaie.
- Compatibles avec les pansements et consommables V.A.C.®. Veuillez vous référer à la liste des solutions dont la compatibilité avec les pansements et consommables V.A.C.® a été prouvée.

REMARQUE : Pansements V.A.C. GranuFoam Silver®

Le pansement V.A.C. GranuFoam Silver® n'est pas destiné à être utilisé avec la V.A.C. VeraFlo™ Therapy car la solution instillée peut influencer négativement ses bénéfices.

Solutions non compatibles avec la V.A.C. VeraFlo™ Therapy :

- Octenisept®
- Peroxyde d'hydrogène
- Solutions à base d'alcool ou contenant de l'alcool

Pour plus d'informations sur les bénéfices de la V.A.C. VeraFlo™ Therapy, contacter votre représentant KCI.

Consulter l'étiquetage du fabricant pour plus de détails. Le système de thérapie V.A.C.Ulta™ doit être utilisé uniquement avec des solutions topiques pour le traitement des plaies.

REMARQUE : Il existe des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et informations de sécurité spécifiques applicables aux thérapies et produits KCI. Consulter un médecin et le mode d'emploi avant application.

©2011 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Les blocs MEGA BLOKS sont utilisés avec l'autorisation de MEGA Brands Inc. Les marques déposées des médicaments appartiennent à leurs propriétaires respectifs. KCI, Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.), V.A.C.Ulta™, V.A.C. VeraLink, et V.A.C. VeraFlo™ sont des marques déposées de KCI licensing, Inc., ses filiales et/ou ses donneurs de licences. Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement. DSL#11-0018. (01/2011)

Les unités de thérapie ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® et V.A.C.Ulta™ (et leurs consommables associés) sont indiquées dans le traitement des plaies par pression négative. Merci de lire attentivement et respecter les informations figurant dans les "Recommandations Cliniques V.A.C.® Therapy" ainsi que le manuel d'utilisation de ces produits. Ilb, AMTAC/0473, KCI USA, Inc.