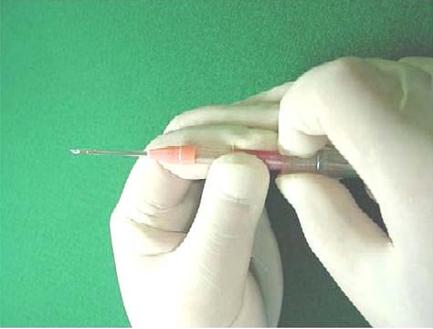
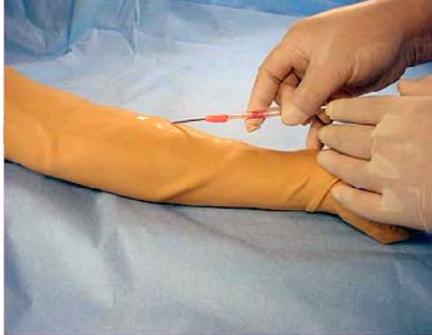


	<p>Tenir l'embase du cathéter et retirer le capuchon protecteur</p>		<p>Retirer le capuchon sans endommager la pointe de l'aiguille</p>		<p>Vérifier que le trocart dépasse de l'extrémité du cathéter. Vérifier la connexion du Luer-Lock</p>
	<p>Maintenir le cathéter biseau orienté vers le haut</p>	 <p>1) Ponction : maintenir fermement le raccord pour éviter la rétraction du trocart dans le cathéter</p> <p>2) Vérifier le retour sanguin et monter le cathéter dans la FAV</p>	<p>1) Ponction : maintenir fermement le raccord pour éviter la rétraction du trocart dans le cathéter</p>	 <p>Retirer le trocart jusqu'à audition du double clic confirmant la mise en sécurité.</p>	<p>Maintenir le cathéter en retirant le trocart qui se rétracte dans le tube rigide de sécurisation.</p>
 <p>Retirer complètement le trocart</p>		 <p>Procéder à la fixation (Needlefix, sparadrap) et raccorder à la ligne de CEC</p>	<p>Eliminer soigneusement l'air du cathéter.</p>	<p>ATTENTION : Ne jamais tenter de repositionner le cathéter après retrait du trocart. Risque de coupure et/ou de largage de la partie en FEP du cathéter :</p> 