


Comment bien positionner les bas ATE VenaPure™ Aircast?

1. Milieu de cuisse pour les bas cuisse et les collants
2. Milieu de mollet
3. Du sol au pli fessier (- 5 cm) pour les bas cuisse et les collants
4. Cheville
5. Sol (ou talon) – Ligne poplitée pour les chaussettes

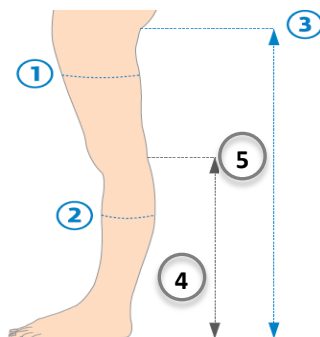

Comment enfiler les bas?

1. Mettre la main dans le talon et mettre le pouce en l'air dans le talon.



2. Retourner le bas comme un doigt de gant jusqu'au talon.



3. Enfiler le pied jusqu'au talon du bas de façon à passer le talon



4. Puis remonter le bas le long de la jambe.



5. S'il existe des plis sur le bas le long du membre, ne pas tirer le bas mais "claquer" le pli de manière à le faire disparaître et à mettre le bas correctement en place.



VenaPure™ : Protocole de mise en place

Pour chaque patient à qui on met en place un produit Venapure™, il faut **respecter le protocole de prises de mesures** afin de choisir la **bonne taille adaptée** au patient.

L'ATE doit être mis en place **avec précaution** par le personnel soignant.

Le patient **doit être informé** et **doit recevoir les explications** liées à la mise en place de ce traitement.

L'ATE doit rester en place sur le patient jusqu'à ce qu'il **retrouve une mobilité complète**.

L'ATE peut être enlevé pour la toilette mais **ne doit jamais excéder 30 minutes d'absence** sur le patient.

L'ATE doit être **lavé tous les 3 jours** (on peut donner 2 paires par patient)

Le patient peut emporter ses ATE à son retour à domicile et continuer le traitement selon **les termes du protocole de prévention**.

Conseils d'entretien

Laver tous les 2 -3 jours à 40 -60°C.

Ne pas utiliser d'adoucissant à base de lanoline.

Sécher à température ambiante.

Dans le respect de ces conseils d'entretien, un ATE a une durée de vie de 2 à 3 mois (ou environ 30 lavages).

Bonnes pratiques concernant l'utilisation des bas anti-thromboses

Bonnes Pratiques

- Sélectionner la bonne taille. Il est important de se fier au tableau de prises de mesures
- Positionner correctement en mettant l'ouverture sur le dessus du pied
- Retirer le bas 30 minutes maximum par jour
- Surveiller le taillage **quotidiennement** en cas de changement de la circonférence de la jambe

Bénéfices

- Assure la bonne compression
- Démarrer à partir du talon
- S'assurer de l'intégrité de la peau et de la circulation sanguine
- La taille de la jambe peut varier en fonction de la durée de l'hospitalisation et de l'évolution ou de l'apparition de l'œdème