

MASQUE BARRIÈRE À USAGE NON SANITAIRE CATÉGORIE 1 - UNS 1 - AFNOR SPEC S76-001 - V1.10

Ce masque aux qualités respirantes et filtrantes permet de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Il est destiné aux patients sains ou asymptomatiques, non destiné aux personnels soignants au contact des patients.

Ce masque a été testé par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (rapport IFTH 2020-06-03-052-50 du 02/07/20) : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

Il répond aux dernières spécifications de l'AFNOR S76-001 (Filtration > 90% pour 3 microns, Respirabilité > 96 L/m²/s).

Il ne s'agit pas d'un dispositif médical, au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni d'un équipement de protection individuelle, au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2), raison pour laquelle il ne doit pas se substituer au masque normalisé.



afnor

ifth Institut Français du
Textile et de l'Habillement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :

Masque lavable et réutilisable **jusqu'à 50 fois**.

Durée de port : 4 heures. Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Composition : Polyester - Coton - Polypropylène.

Contient du latex (au niveau des brides élastiques).

Élastiques à bandes larges pour un meilleur confort.

Les tissus en contact avec la peau sont certifiés OEKO-TEX 1 qui garantit leur innocuité pour le porteur.

Performances :

- Haute filtration : Efficacité de filtration des particules de 3 µm : **99%***.

- Grande respirabilité : Perméabilité à l'air (pour une dépression de 100 Pa) > **133* L/m²/S**.

*Résultats obtenus sur les échantillons testés rapport IFTH 2020-06-03-052-50 du 02/07/20.
Des variations peuvent intervenir selon les produits.

MASQUES BARRIÈRES RÉUTILISABLES

DESCRIPTION D'UN MASQUE BARRIÈRE



STOCKAGE, ENTRETIEN, LAVAGE, SÉCHAGE :

Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble, et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Un masque usagé doit être lavé en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Il est recommandé un séchage complet du masque dans les 2 heures après le lavage. Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l'air libre, avant un repassage à la vapeur à basse température.



CONTEXTE D'UTILISATION :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules.

GESTES BARRIÈRES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

MISE EN PLACE :

Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue. Le port du masque barrière de taille "Junior" doit faire l'objet d'une observance permanente par une personne qui assiste le jeune utilisateur. Il est considéré que le masque entraînant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne convient pas.



Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation de masque.



Repérer le sens du masque et le placer sur le visage.



Positionner le masque en passant les élastiques de part et d'autre des oreilles.



Abaissier le bas du masque barrière sous le menton.



Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains.



Retirer le masque usagé à l'aide des élastiques pour éviter la contamination potentielle.

DOMAINE D'UTILISATION :

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice d'information.

Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS).

Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre...). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

DÉSIGNATION	TAILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN	CONDITIONNEMENT
MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE UNS1-BLANC-ADULTE PACK 10 EX.	ADULTE	82-0282	0190446703648	10 MASQUES
MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE UNS1-BLANC-JUNIOR PACK 10 EX.	JUNIOR (à partir de 11 ans)	82-0281	0190446703631	10 MASQUES

Pas de panachage possible

Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de son usage afin de ne pas diminuer son efficacité.



DJO France S.A.S.
Centre Européen de Frêt
3 rue de Bethar - 64990 Mouguerre
Tél : 05 59 52 86 90 - Fax : 05 59 52 86 91

