

## ROSE - Petit (Pédiatrie) PRH028PI01A



- Le modèle rose est utilisé à la fois sur les nourrissons et les enfants pour les procédures sur les membres supérieurs et inférieurs.

### Avantages :

- Le profil étroit fournit une région chirurgicale beaucoup plus large qui n'est pas disponible avec des manchons traditionnels. Ce modèle peut être utilisé dans les procédures suivantes :
- Des procédures de la chirurgie orthopédique pédiatrique générale.
- Des procédures concernant les malformations des membres.
- Des procédures d'allongement des membres.
- Parfois utilisé sur les adultes maigres.

**Conseil :** Ne pas utiliser l'appareil sur des membres plus longs que 70 cm.

## JAUNE - Moyen (Bras) PRH040YE01A




- Le modèle jaune est utilisé pour les procédures sur les membres supérieurs adultes.

### Avantages :

- Le dispositif peut être placé plus près de la région chirurgicale à l'avant-bras et réduire le volume du tissu ischémique.
- On obtient l'élargissement de la région chirurgicale lors des traumatismes au-dessus du coude. Ce modèle peut être utilisé dans les procédures suivantes :
- Toute sorte d'interventions chirurgicales à la main et au poignet (ex. Doigt à ressort, le syndrome du canal carpien).
- Fractures Poignet / Main / Coude.
- Fractures Humérus / Cubitus / Radius.
- Transfert de lambeau libre (chirurgie plastique).
- Parfois utilisé en pédiatrie, sur les cuisses.

**Conseil :** Pour l'application, utilisez les éléments de positionnement médial-latéral (M-L).

## ORANGE - Large (Pied) PRH060OR01A

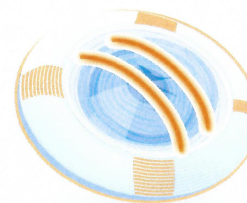


- Le modèle orange est utilisé pour les procédures sur les membres inférieurs adultes et sur les membres supérieurs des obèses.

### Avantages :

- Le dispositif fournit une exsanguination supérieure des membres inférieurs et une région chirurgicale plus large et stérile. Ce modèle peut être utilisé dans les procédures suivantes :
- Pied et Cheville (ex. Bursite).
- Genou (ex. ACL, TKL).
- Traumatisme des membres inférieurs.
- Transfert de lambeau libre (chirurgie plastique).

**Conseil :** Pour l'application, utilisez les éléments de positionnement antérieur-postérieur (A-P).

## NOIR & BLANC - Extra Large (Pied) PRH090BW01A

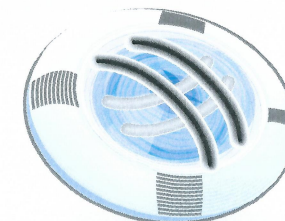

- Le modèle noir et blanc est utilisé pour les procédures sur les membres inférieurs grande taille.

### Avantages :

- Le dispositif est particulièrement adapté pour les patients obèses et leurs membres effilés. Ce modèle peut être utilisé dans les procédures suivantes :
- Pied et Cheville (ex. Bursite).
- Genou (ex. ACL, TKA).
- Traumatisme des membres inférieurs.
- Transfert de lambeau libre (chirurgie plastique).

**Conseil :** Ce modèle contient quatre cordons et son application nécessite deux personnes.