

Système Prevena™ Incision GUIDE D'APPLICATION



Longueur et types d'incision

1

1 / Vérifier le type d'incision



Plaies sternales - Cardiovasculaire et thoracique




Ob/GYN - Césarienne



Orthopédie - Hanche

2 / Longueur d'incision adéquate

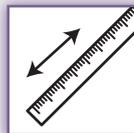

20 cm maximum

Préparation

2

1 / Avant la chirurgie 2 / Après la chirurgie



Raser ou tondre



Nettoyer




Sécher


Pour obtenir les meilleures performances du produit et réduire le risque d'infection, la zone d'incision doit être rasée ou tondue, nettoyée puis séchée avant d'appliquer le pansement Prevena™ Incision.

Application

INFORMATIONS IMPORTANTES

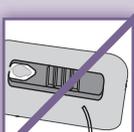

Pas de drains sous le film adhésif

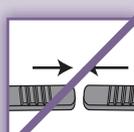


Pas de pontage




Pas de découpage

3

1 / Décoller et placer le pansement

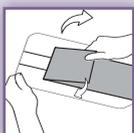

Décoller la bande centrale au dos du pansement pour faire apparaître les languettes et l'adhésif.

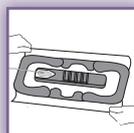

Centrer et appliquer le pansement sur l'incision fermée. S'assurer que l'adhésif n'est pas en contact avec la fermeture de l'incision.




Retirer les adhésifs inférieurs restants. Saisir les languettes inférieures et tirer doucement.



Appuyer fermement sur les bords du pansement pour assurer une bonne étanchéité aux zones de contact entre l'adhésif et la peau.



Retirer la couche de stabilisation supérieure.

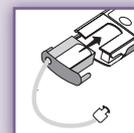

Insérer le réservoir dans l'unité et le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il émette un déclic. Il est complètement inséré lorsque les languettes latérales sont au ras de l'unité.

2 / Connecter l'unité

Il s'agit d'une illustration d'une application standard. Se reporter au Guide Clinicien du Système Prevena™ Incision pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation et l'application du produit.

Utiliser la fonctionnalité VisiCheck™ dès le début de la thérapie

4

1 / Rapidité de VisiCheck™

VisiCheck™ permet de vérifier immédiatement l'étanchéité du pansement.



Démarrer la thérapie Prevena™ en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt, puis attendre que le pansement se contracte. Appuyer rapidement deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Le taux de prise d'air s'affiche pendant 3 secondes.

2 / Affichage



Aucune action requise



Revérifier rapidement :
- Le connecteur
- Le réservoir
- L'étanchéité du pansement



Résolution anticipée d'une prise d'air - Évaluer :
- Le connecteur
- Le réservoir
- L'étanchéité du pansement

Suivi médical (IMPORTANT) : le pansement doit rester en place pendant au moins 4 jours

5

1 / Ne pas retirer le pansement pour observation



Le pansement doit rester en place pendant au moins 4 jours. Il peut être laissé en place pendant 7 jours maximum.

IMPORTANT : veiller à ce que les incisions restent fermées afin de les protéger de potentielles infections externes. Une thérapie ininterrompue fournit de meilleurs résultats cliniques.



Si une infection est suspectée, utiliser les procédures médicales normales pour la surveillance du patient.

Pour une assistance clinique ou pour commander des produits, veuillez contacter le centre d'appel KCI : au 0 800 47 83 47 ou sur www.kci-medical.com



REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, mises en garde, précautions et informations de sécurité spécifiques applicables aux thérapies et produits KCI. Consulter un médecin et le mode d'emploi avant application.

©2010 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de KCI Licensing, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement.
N° DSL 10-0593.EMEA - 10/10