



Bracelet hémostatique Diastop

Technique de pose





1. Positionner le coussinet perpendiculairement à l'aiguille sans comprimer. Présenter la languette dans l'encoche prévue à cet effet.

2. Appliquer une pression sur le coussinet et le point de ponction, tout en retirant l'aiguille.

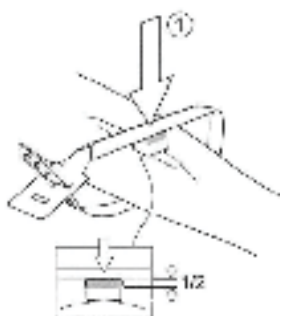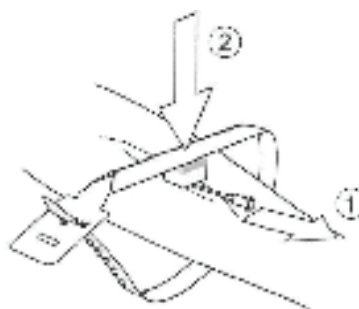

3. Appliquer une pression modérée sur le coussinet tout en tirant la languette pour fermer le bracelet. Une compression nécessaire et suffisante est obtenue lorsque l'épaisseur du coussinet est réduite de moitié.

4. Fixer la languette dans l'encoche prévue et la rabattre pour sécuriser la bonne tenue du Diastop.

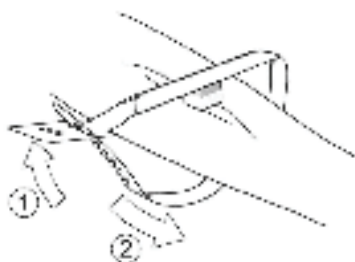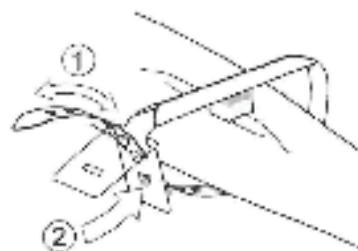

Retrait : lorsque l'hémostase est atteinte, effectuer les opérations inverses en tirant la languette vers l'arrière.