

# BETAFIX<sup>®</sup>

## Description :

Bande élastique munie d'un tampon ultra-absorbant constitué de 2 couches séparées par un film imperméable.

## Indication :

Spécialement étudié comme bande post-dialyse pour la compression des points d'insertion des aiguilles ou cathéters pour réaliser l'hémostase. Egalement indiqué chez les patients traités par transfusion intra-veineuse.

## Avantages :

Réduit le risque de saignement en raison de la compression continue exercée sur la fistule.

Agit comme une barrière de protection contre les risques d'infection.

Non-adhérente sur la peau et retrait atraumatique.



## COMPRESSE HEMOSTATIQUE

### Instruction de pose

- 1 Ouvrir la bande comprenant le tampon.
- 2 Positionner le tampon sur le point de ponction de l'aiguille. Effectuer l'hémostase.
- 3 Dérouler la bande sur le bras à la tension voulue.
- 4 Fixer le pansement avec l'adhésif hypoallergénique intégré.



Données et spécifications sont sujets à changement sans préavis.

Classification: Dispositif médical de classe I  
Biocompatibilité: Biocompatible en accord avec les normes UNI EN ISO 10993  
Conditionnement : Emballage primaire: double blister  
Papier polyéthylène de qualité médicale  
Stérilisation : Rayons  $\gamma$   
Durée d'utilisation : 5 ans

### Référence

CODE	BANDE		TAMPON	Nombre de bande par blister	Nombre de blister par carton	
	Couleur	Longueur totale	hauteur (cm)			Diamètre (cm)
S0029	BLANC	50±10%	6	Ø 2,6	1	500
S0030	BLANC			Ø 2,6	2	300