

Cathéter à fistule SUPERCATH SP 502

IMPORTANT

1.


Ne pas tenter de
repositionner le
cathéter après
ponction.

2

Maintenir le cathéter
droit avant le retrait
de l'aiguille


3.

Correct

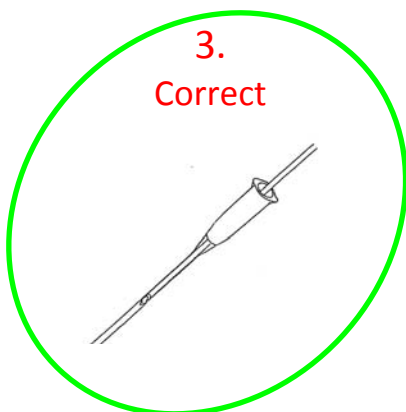

4.

Incorrect

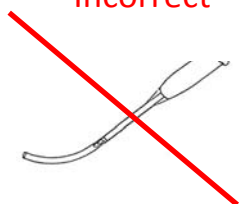

Bernas Médical

55 rue Stéphenson
75018 PARIS

01 53 41 41 42


dimed@bernas-medical.com
www.bernas-medical.com

Instructions pour l'utilisation des cathéters Supercath

Lire attentivement avant utilisation.

Utilisation

Le cathéter Supercath est une nouvelle version des aiguilles destinées à ponctionner les vaisseaux sanguins pour les raccorder au circuit extracorporel d'hémodialyse. Le cathéter comporte une valve hémostatique pour éviter toute fuite sanguine après retrait de l'aiguille, ce qui prévient contamination et infection.

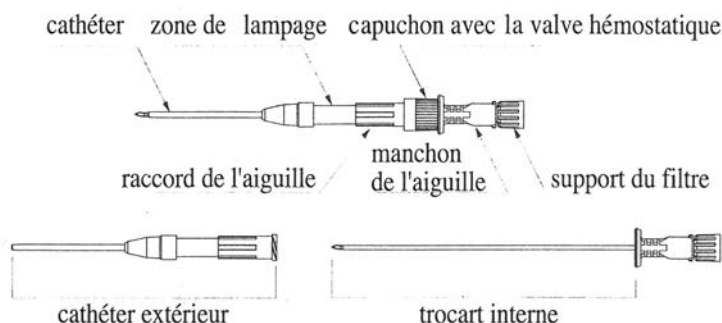

Caractéristiques

Produit à usage unique, stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Re-stérilisation et ré-utilisation strictement interdites.
Ouvrir l'emballage immédiatement avant utilisation. Utiliser immédiatement après ouverture.
Jeter selon protocole en vigueur pour éviter contagion et infection.
Veiller tout particulièrement à ne pas se piquer.
Ne pas utiliser le cathéter si l'emballage est humide, ouvert ou taché, ou bien si le cathéter est cassé.
Travailler en aseptic.
Ne pas mettre en contact avec de l'eau, la lumière directe, ou des température et humidité élevées.
Utiliser la taille adaptée au patient.

Mode d'emploi

1. Ouvrir le sachet et en sortir le produit.
2. Ponctionner avec l'aiguille dirigée vers le haut.
Attention: Lors de la ponction, maintenir l'extrémité de l'aiguille interne et vérifier que l'aiguille interne reste bien en place.
3. Vérifier soigneusement que l'aiguille est dans le vaisseau : le sang doit apparaître dans le manchon de l'aiguille (figure 1).
Attention : utiliser un nouveau cathéter s'il s'avère nécessaire de re-piquer.
4. Faire avancer le cathéter dans le vaisseau tout en stabilisant le trocart interne comme illustré figure 2.
5. Retirer le trocart interne.
6. Clamper la zone de clampage avec une pince, comme illustré figure 3.
7. Retirer le capuchon comportant la valve hémostatique (figure 4).
8. Faire sortir l'air restant dans le cathéter en ajustant le clamp (figure 5).
9. Raccorder à fond le connecteur au circuit de sang et retirer le clamp.
10. Fixer le cathéter avec du sparadrap.

Figure 1.

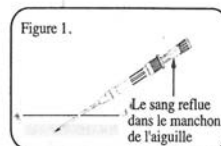


Figure 2.



Figure 3.

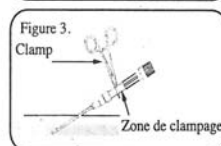


Figure 4.

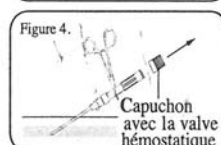


Figure 5.

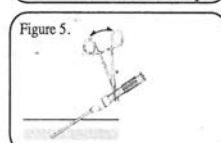


Figure 6.

