

Notice d'utilisation

Urodynamique

GANL Nr 30 Urodynamik FR_00/31.10.2011

Attention : ce produit médical doit être acheté et utilisé uniquement par du personnel médical spécialisé.

1 Désignation

Sonde de mesure double et triple lumière et sonde de pression rectale simple et double lumière pour bilan urodynamique.

2 Contenu et emballage

- Sonde de mesure triple lumière avec embout Tiemann ou Nelaton.
- Sonde de mesure double lumière avec embout Tiemann ou Nelaton.
- Sonde de pression rectale simple lumière avec ballonnet en latex
- Sonde de pression rectale double lumière avec ballonnet en latex ou en silicone
 - Mode d'emploi
 - Emballage simple
 - Emballage double pour sonde de pression rectale double lumière en silicone

Produits stérilisés à l'oxyde d'éthylène.

3 Indications thérapeutiques

Sonde de mesure de la cystométrie et de la profilométrie de la pression urétérale (UPP).

4 Contre-indications

Infections sévères, septicémie d'origine urinaire.

5 Mode d'emploi

- Raccordez la sonde de mesure en fonction des codes couleur fournis.

Sonde de mesure triple lumière

- Jaune : voie de remplissage
- Bleu : voie de mesure (Pves)
- Rouge : voie de mesure (Pura)

Sonde de mesure double lumière

- Transparent : voie de remplissage
- Bleu : voie de mesure (Pves)

Sonde de pression rectale double lumière

- Transparent : voie de décharge pour élimination de l'air
- Blanc : voie d'alimentation pour élimination de l'air et mesure (Pabd)

Sonde de pression rectale simple lumière

- Transparent : voie de remplissage et voie de mesure

- Raccordement à la station de mesure
 - Figure 1 pour la sonde de mesure triple lumière
 - Figure 2 pour la sonde de mesure double lumière et la sonde de pression rectale

6 Avertissements / Mesures de précaution

- La stérilité du produit n'est garantie qu'à condition que l'emballage n'ait été ni endommagé, ni ouvert. Exclusivement à usage unique ! Ne pas restériliser ! Risque d'usure du matériel et de stérilisation insuffisante !
- Ne pas essayer la prothèse avec de l'alcool. Cela pourrait l'endommager.
- La sonde de mesure ne peut être utilisée que par des professionnels formés à son utilisation.

- Tous les composants doivent être soigneusement vérifiés avant emploi. Les produits susceptibles d'être endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Pour éviter toute erreur de mesure, vous devez tenir compte des raccordements des sondes à la station de mesure (voir le mode d'emploi fourni par le fabricant pour la station de mesure utilisée).

7 Élimination

Après utilisation, ce produit peut constituer un danger biologique. Le manipuler et le jeter conformément à la pratique médicale acceptée et aux lois et réglementations locales, nationales et fédérales en vigueur.

Figure 1


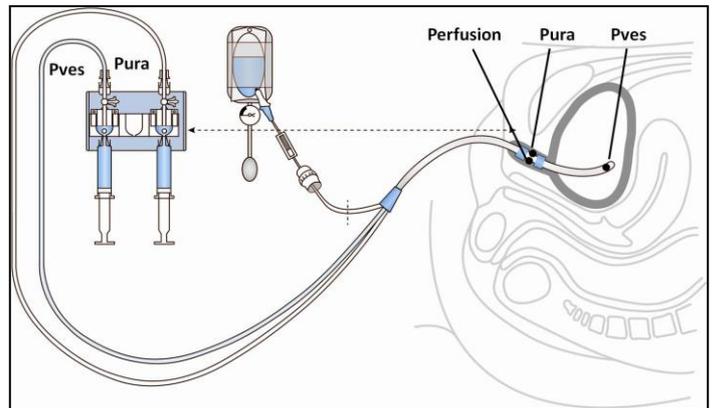


Figure 2

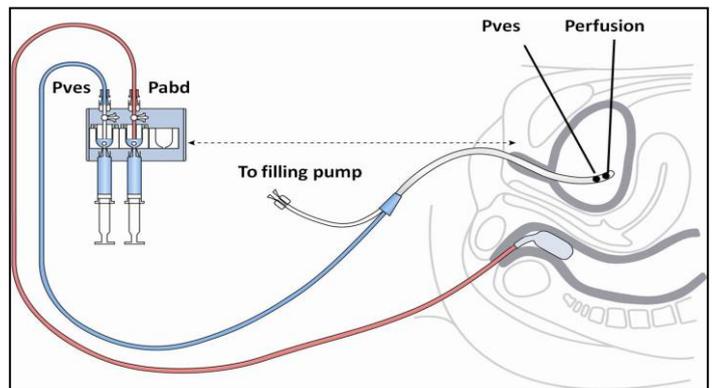

Medizinische Technologie GmbH
Medi-Globe-Straße 1-5, D-83101 Achenmühle
Tel.: 08032-973-200, Fax: 08032-973-211
info@urotech.com; www.urotech.com

Rx only

CE 0123

STERILE EO