

# Notice d'utilisation

## Panier d'extraction

GANL Nr. 25 Steinfangkörbchen FR/01/09.12.2010

Attention : ce produit médical doit être acheté et utilisé uniquement par un personnel spécialisé.

### 1. Désignation

Panier d'extraction en nitinol avec poignée amovible

### 2. Contenu

Panier d'extraction en nitinol avec poignée amovible dans un tuyau protecteur  
Longueur: 90 cm ou 120 cm  
Panier avec trois, quatre ou six fils, droit ou hélicoïdal.  
Type de panier : standard, sans extrémité, filiforme

### 3. Indications thérapeutiques

Le panier d'extraction sert à capturer et retirer les calculs rénaux à l'aide d'un endoscope rigide ou flexible au cours d'une intervention transurétrale.

### 4. Contre-indications

Les contre-indications procèdent des limites des domaines d'utilisation d'urétéroréno-scopie.

### 5. Effets indésirables

- Lésion de l'uretère durant l'intervention (perforation)
- Fibrose locale suite à une extravasation de l'urine
- Striction de l'uretère (< 1 %)
- Reflux vésico-urétéral
- Lésion du rein (hémorragie)
- Infection des voies urinaires
- Hémorragies
- Douleurs


### 6. Mode d'emploi

Le panier d'extraction est introduit à l'aide d'un urétéroréno-scopie. Une fois le calcul emprisonné dans le panier, celui-ci est refermé, puis soigneusement retiré.


#### 6.1. Retrait du panier

6.1.1. Retirer le capot de protection

À l'aide de ciseaux ou d'une pincette stériles, percer le perforage prévu à cet effet et séparer le capot de protection du corps de poignée.

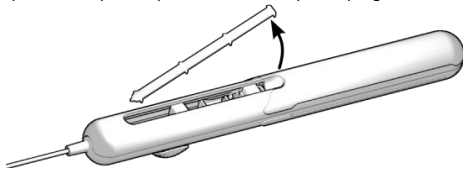


6.1.2. Faire glisser le système de fixation jaune et gris jusqu'en butée.

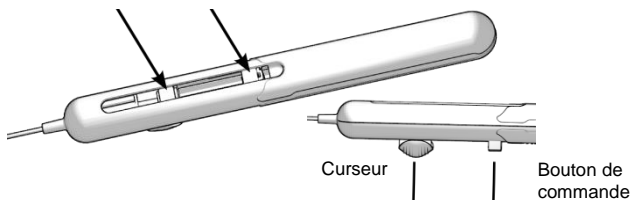

6.1.3. Sortir le panier.

(si le panier se coince dans la poignée amovible, il est possible de le sortir en déplaçant de nouveau le curseur jusqu'en butée.)

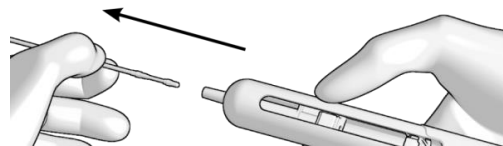


#### 6.2. Fixation du panier


6.2.1. Introduire le fil du panier jusqu'en butée.

##### Attention :


Assurez vous que le curseur et le bouton de commande sont ouverts jusqu'en butée (voir étape 3 !)

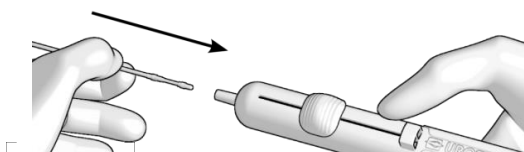

6.2.2. Déplacer le curseur vers le bas jusqu'en butée.

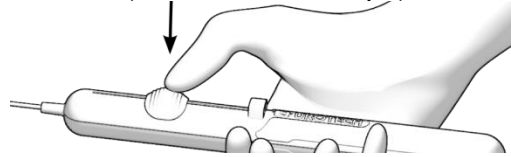


6.2.3. En position enfoncée, tirer le curseur jusqu'à enclenchement et le maintenir en position.

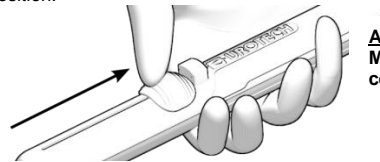

**Attention !**  
Maintenir le curseur dans cette position !

6.2.4. Appuyer sur le bouton de commande gris.

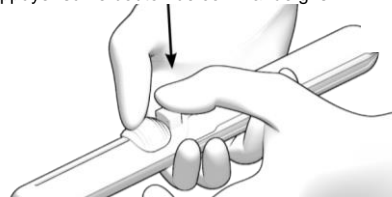

Le panier d'extraction et la poignée sont de nouveau prêts à être utilisés.

### 7. Complications et / ou risques éventuels

- Il est possible que certains gros calculs rénaux soient trop volumineux pour être retirés à l'aide d'un panier d'extraction. Ils risquent alors de s'enclaver au niveau de la région rénale ou de l'uretère.
- Ils risquent également de ne plus pouvoir être largués du panier.
- Le panier peut retourner.
- Au cours du retrait, forcer le passage en cas de résistance risque de rompre le panier.
- Si le panier est fortement plié lors de l'introduction de la gaine, il est possible qu'il soit plus compliqué ou impossible de l'introduire ou de le retirer. Dans ce cas, il faut faire progresser le panier entier de quelques millimètres en avant ou en arrière. Lorsque l'on fait progresser le panier ou qu'on le retire, forcer le passage en cas de forte résistance risquerait d'endommager le produit.

### 8. Instructions d'utilisation et mesures de précaution

- N'est stérile que lorsque l'emballage est intact ou non ouvert. Destiné à une utilisation unique ! Ne jamais restériliser ! Risque de fatigue statique ou défaut d'asepsie.
- Ne pas utiliser un désinfectant, Urotech n'a mené aucune étude sur les conséquences éventuelles d'un tel produit sur le matériel.
- Cet instrument doit être uniquement utilisé par un médecin familier de ce type de dispositifs.
- Ne pas pivoter le panier ouvert dans l'uretère. Un pli dans la gaine empêche la commande mécanique du panier.
- Il est recommandé de dilater l'uretère avant l'endoscopie et le retrait des calculs pour éviter tout enclavement du calcul lors du retrait.
- La taille du calcul doit être déterminée avant l'intervention à l'aide d'ultrasons ou d'une radiographie afin d'éviter tout enclavement du calcul au niveau de l'appareil urinaire. Ne pas utiliser le panier d'extraction si le calcul est trop volumineux.
- Il faut faire progresser le panier et le retirer précautionneusement pour éviter toute lésion de la muqueuse ou de l'appareil urinaire (trauma, lésion).
- Durant une opération au laser, l'instrument ne doit pas subir les impulsions d'un laser à colorant pulsé.
- Ne jamais appliquer le laser directement sur le panier.

### 9. Réactions croisées

Les réactions croisées avec les médicaments sont inconnues.

### 10. Élimination

Après utilisation, ce produit devra être considéré comme biologiquement dangereux. Son maniement et son élimination doivent être effectués selon des procédés médicaux reconnus et conformément aux règlements et directives en vigueur.

CE 0123

Rx only

STERILE EO



UROTECH