

Attention : ces produits médicaux doivent être achetés et utilisés uniquement par du personnel médical spécialisé.

1. Désignation

Sonde simple lumière avec différents embouts et différentes tailles.

2. Contenu et emballage

- Sonde ouverte ou fermée
- Embouts : Nelaton, Tiemann, Chevassu, embout flexible
- Stylet
- Adaptateur universel pour fixer la seringue
- Emballage simple avec mode d'emploi

Produits stérilisés à l'oxyde d'éthylène

3. Indications thérapeutiques

Pour urographie rétrograde : pour injecter les produits de contraste dans l'urètre et le rein à travers la sonde afin que l'urètre et le rein soient visibles sur la radiographie.

4. Indications

Administration de produits thérapeutiques ou de contraste

5. Contre-indications

Les contre-indications émanent des contraintes de l'application de base correspondante.

6. Effets secondaires

Infection causée par la sonde (bactériurie)

7. Mode d'emploi

La sonde urétérale doit être insérée dans l'urètre en utilisant la technique endo-urologique standard (sous visualisation radiographique directe).

8. Complications et/ou risques éventuels

- Ne pas essuyer la prothèse avec des produits désinfectants, étant donné qu'UROTECH ne dispose d'aucune information concernant les changements importants que cela pourrait entraîner.

9. Avertissements / Mesures de précaution

- La stérilité du produit n'est garantie qu'à condition que l'emballage n'ait été ni endommagé, ni ouvert. Exclusivement à usage unique !
- Le fait de pousser la sonde urétérale avec le stylet ou le fil-guide peut engendrer des lésions urétérales.
- Tous les composants doivent être soigneusement vérifiés avant emploi. Les produits susceptibles d'être endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Seuls des médecins expérimentés et familiers avec la manipulation de ce type de dispositif et des techniques chirurgicales associées sont autorisés à se servir de ce produit.
- Ne pas nettoyer le produit et les composants du kit avec de l'alcool. Cela pourrait endommager la surface.
- Ne pas endommager la sonde, le stylet ou le guide-fil avec des instruments chirurgicaux tranchants : le risque qu'ils se cassent s'en trouverait augmenté. Ne pas étirer démesurément la sonde avant son utilisation. Un étirement trop important augmente le risque de cassure.
- Évitez de plier la sonde et le stylet de manière trop prononcée.
- Ne pas utiliser de fil dont le diamètre est plus grand que la lumière interne indiquée de la sonde.

10. Réactions croisées

Inconnues

11. Élimination

Après utilisation, ce produit peut constituer un danger biologique. Veuillez le manipuler et le jeter conformément à la pratique médicale acceptée et aux lois et réglementations locales, nationales et fédérales en vigueur.

Attenzione: Questi prodotti medicali possono essere acquistati e utilizzati esclusivamente da personale medico specializzato.

1. Descrizione

Catetere a 1 lume con punte e dimensioni differenti.

2. Contenuto e imballaggio

- Catetere aperto o chiuso
- Punte: Nelaton, Tiemann, Chevassu, punta flessibile
- Stylet
- Adattatore universale per l'attacco della siringa
- Imballaggio unico con istruzioni per l'uso

Sterilizzato con ossido di etilene.

3. Campo di applicazione

Per urografia retrograda: per iniettare agenti di contrasto attraverso il catetere nell'uretere e nel rene, al fine di rendere l'uretere e il rene visibili nella diagnostica radiologica.

4. Indicazioni

Somministrazione di mezzo di contrasto o terapeutico.

5. Controindicazioni

Le controindicazioni derivano dalle limitazioni relative alle rispettive indicazioni di base.

6. Effetti collaterali

Infezione indotta dal catetere (batteriuria)

7. Istruzioni

Inserire il catetere ureterale nell'uretere utilizzando la tecnica endourologica standard (sotto diretta visualizzazione radiografica).

8. Possibili complicanze e/o rischi

- Dal momento che UROTECH non dispone di informazioni sui cambiamenti del materiale che ne possono conseguire, non trattare i prodotti con agenti disinfettanti.

9. Avvertenze / misure precauzionali

- Sterilità garantita solo con imballaggio integro e sigillato. Solo per impiego monouso!
- Facendo avanzare il catetere ureterale con lo stylet o il filo guida, possono verificarsi lesioni dell'uretere.
- Tutti i componenti devono essere controllati scrupolosamente prima dell'uso. I prodotti eventualmente danneggiati non devono essere utilizzati.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da medici che hanno acquisito esperienza nell'utilizzo di tali dispositivi medicali e nelle tecniche chirurgiche associate.
- Non pulire il prodotto o i componenti del kit con alcool. L'alcool potrebbe danneggiarne la superficie.
- Non danneggiare il catetere, lo stylet o il filo guida con strumenti chirurgici appuntiti: sussiste l'elevato pericolo di frattura. Non tendere eccessivamente il catetere prima dell'uso. L'estensione eccessiva aumenta il pericolo di frattura.
- Non piegare eccessivamente il catetere e lo stylet.
- Non utilizzare un filo con diametro superiore al lume interno indicato del catetere.

10. Reazioni crociate

Non conosciute

11. Smaltimento

Dopo l'uso, questo prodotto può essere potenzialmente pericoloso dal punto di vista biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto secondo la pratica medica comunemente accettata e secondo le leggi e le norme locali e nazionali applicabili.