

Pharmapore PU IV Frame Style

Description :

Pansement film pré-fendu en polyuréthane transparent, respirant, imperméable, agissant comme une protection antivirus et antibactérienne. Il peut être doté ou non d'une compresse absorbante centrale positionnée à la base de la fente.

Indications :

Pour fixation de canule et de cathéter.

Précautions :

- 1- S'assurer que la peau est propre, sèche et sans résidu de savon ou de lotion afin d'assurer une bonne adhésion du pansement.
- 2- Arrêter tout saignement au niveau du site avant d'appliquer le pansement.
- 3- Ne pas étirer le pansement lors de son application car des tensions peuvent entraîner des traumatismes de la peau.

Contre-indications :

Aucune.

Conseil d'utilisation :

- 1- Désinfecter soigneusement la zone du point de ponction du cathéter qu'on aura laissé sécher complètement.
- 2- Ouvrir le sachet en utilisant une technique aseptique.
- 3- Retirer la fenêtre centrale avec les 2 bandelettes de fixations, si elles sont présentes.
- 4- Décoller les bandelettes de fixation afin de sécuriser les ailettes du cathéter.
- 5- Décoller le grand rabat de la protection anti-adhésive.
- 6- Centrer la partie transparente du pansement sur le site de ponction et presser doucement.
- 7- Enlever le petit rabat de la protection anti-adhésive, si présent.
- 8- Lisser le pansement depuis le centre vers les bords.
- 9- Décoller doucement le cadre en papier tout en lissant les bords du pansement avec vos doigts.
- 10- Inscire les informations sur l'étiquette papier et la placer sur ou à proximité du pansement.

Stérilisation :

Stérilisé par Oxyde d'éthylène sauf si l'emballage est endommagé ou ouvert.

Conditions de stockage :

Stocker dans un endroit sec et frais.

10x12 cm



8.5x11.5 cm



5x5.7 cm



6x7 cm



7x9 cm



0120

Store in cool dry place.



Visit our website

Pharmaplast
Amria - Alexandria
Egypt
www.pharmaplast-online.com

EC RBP
Authorised Representative In the
European Community
M Devices Group / E C Rep Ltd,
Healthcare Education Centre,
Portland Street, Southport, PR8 1HU, UK
Tel: +44 1704 544 944
Fax: +44 1704 544 050
Email: info@ecrep.com

Pharmaplast		Amria 23512, Alexandria - Egypt www.pharmaplast-online.com		Leaflet artwork template no: I-TM /AR/001-5			
Customer : Pharmaplast		Product name : Pharmapore PU IV Frame style					
Issue date : 06-03-2019		Prepared by : Nader Nabil Zaki					
Colors :		Dimension : 10 x 21 cm					
Issue Number	Revision Date	Description of Change	Rationale For Change	Approved by			
				Artwork manager	Marketing department	RA Department	
1	N/A	New Issue	N/A				