


AVANOS*

MIC-KEY* OVER-THE-WIRE STOMA MEASURING DEVICE

Instructions for Use

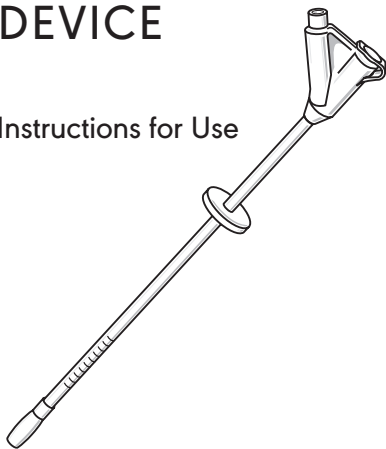

Rx Only: Sur ordonnance uniquement : aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance.

⚠ Avertissement :

Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce dispositif médical. Toute réutilisation, tout retraitement ou toute restérilisation peut : 1) affecter négativement les caractéristiques de biocompatibilité connues du dispositif, 2) compromettre l'intégrité structurelle du dispositif, 3) conduire à une performance non prévue du dispositif ou 4) créer un risque de contamination et entraîner la transmission de maladies infectieuses pouvant se traduire par une blessure, une maladie ou même le décès du patient.

Mode d'emploi

1. Mouiller l'extrémité de l'appareil de mesure avec un lubrifiant hydrosoluble ou de l'eau.
2. Confirmer que le bouton préalablement attaché est solidement fixé à la partie supérieure de la lumière. Insérer le dispositif dans l'estomac par le site de stomie. **NE PAS FORCER.**
Remarque : *La mise en place peut être facilitée par l'usage d'un fil-guide de 0,038 pouces en retirant le bouton.*
3. Gonfler le ballonnet avec 5 ml d'eau ou de sérum physiologique.
4. Éloigner doucement l'appareil de mesure de stomie du patient, jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir contre la paroi abdominale.
5. Le patient étant en décubitus dorsal, faire glisser le disque en plastique vers la stomie.
6. Lire le repère au-dessus du disque. L'ajout de 1 à 2 mm à la longueur réelle de la stomie laisse une marge pour une adaptation correcte. La précision de ce dispositif est de $\pm 0,125$ cm.
7. Éloigner le disque de la stomie et relever le patient. Faire glisser le disque vers la stomie.
8. Lire le repère au-dessus du disque.
9. Noter la moyenne des deux lectures en centimètres.
10. Dégonfler le ballonnet et retirer l'appareil.



www.avanos.com

CE 2797

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC,
5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.
In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). • www.avanos.com

 Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway,
Alpharetta, GA 30004 USA.

 Avanos Medical Belgium BVBA,
Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd,
475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067, Australia.

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc.,
or its affiliates. © 2018 AVNS. All rights reserved. 2019-01-28
15-M1-209-01 / 70211151