

GAMME ATH – Fiche descriptive

Indication : prévention de la thrombose veineuse


SIGVARIS
GROUP

Un produit **simple d'utilisation** pour les professionnels de santé tout en garantissant **confort** et **efficacité** pour le patient

EFFICACITÉ – SIMPLE D'UTILISATION - CONFORT



FABRICATION
100 % FRANÇAISE

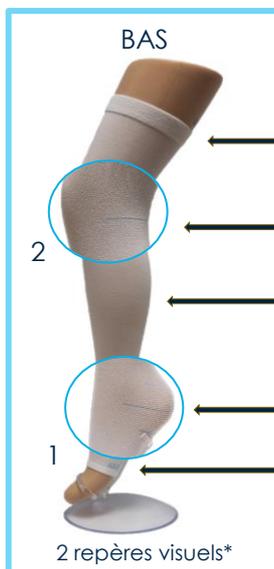

- Fil enduit silicone
Positionnement à mi-cuisse
- Creux poplité représenté par 1 trait bleu
- Texture très douce
- Talon représenté par 3 traits bleus
- Pied ouvert

*Les repères visuels permettent le bon positionnement

PRÉSENTATION DE L'OFFRE

GAMME MIXTE

CHEVILLE

NIVEAU DE PRESSION : 15-20 mmHg

MODÈLES


CHAUSSETTE ET BAS

TAILLAGE

5 TAILLES – 2 HAUTEURS

COLORIS

BLANC

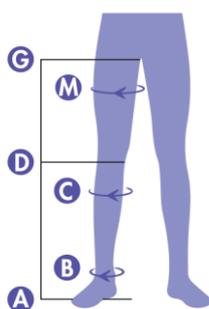

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
1	17 – 20	29 – 36	45 – 60
2	20 – 23	32 – 39	48 – 63
3	23 – 26	36 – 43	54 – 69
4	26 – 29	40 – 47	58 – 73
5	29 – 32	44 – 51	62 – 77


Hauteur	½ jambe A-D	Jambe A-G
Normal	< 41	< 77
Long	> 41	> 77

COMPOSITION :

Chaussette : 68 % Polyamide ; 31 % Elasthane ; 1 % Polyester.

Bas : 61 % Polyamide ; 33 % Elasthane ; 3 % Polyester ; 3 % Silicone.


Module de formation

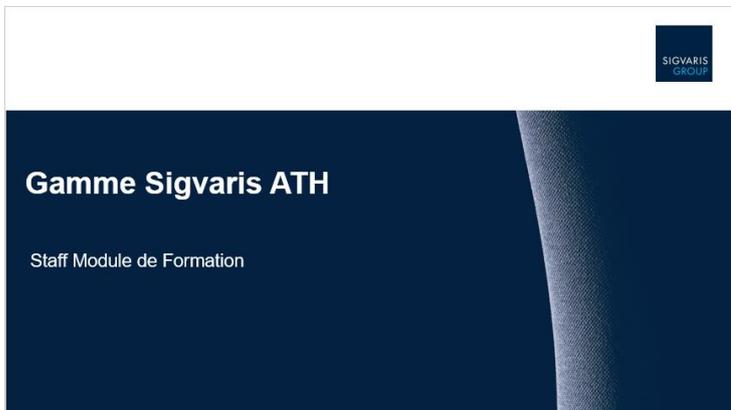


Packaging



Mètre ruban

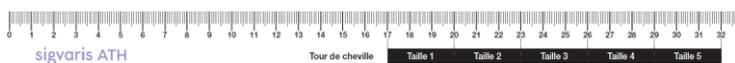

Notice

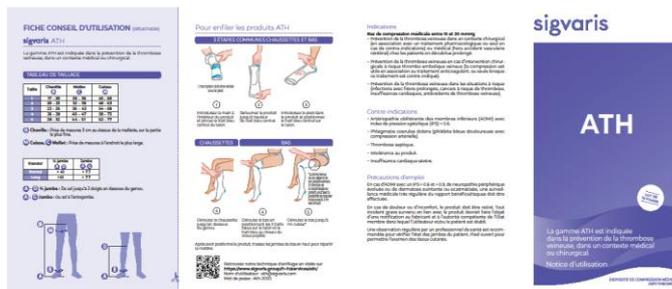

Vidéos



Page internet exclusive

Retrouvez notre technique d'enfilage en vidéo sur <https://www.sigvaris.group/fr-fr/services/ath/>
 Nom d'utilisateur : ath@sigvaris.com
 Mot de passe : Ath-2020



Partie détachable
Fiche conseil d'utilisation

Service clients

Appelez-nous au :

03 89 70 24 24 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h

Les chaussettes et bas de compression médicale Sigvaris ATH sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés à la prévention de la thrombose veineuse. Pour le bon usage, il convient de porter les produits de jour comme de nuit dans le cadre de la prévention de la thrombose veineuse profonde. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications.

Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide. ©Copyright 2020, by SIGVARIS St-Just St-Rambert, France.
 Fabricant : SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - Rue B. Thimonnier - 42170 St-Just St-Rambert