

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSITIF MEDICAL**

**NOM :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Sonde de compression oesophagienne usage unique

**Nom commercial :** Sonde de Linton-Nachlas Sonde de Sengstaken-Blakemore

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 5 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage. Vérifier l'intégrité de la sonde, des ballonnets et des valves
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> - Se référer à la notice d'utilisation - Pas d'IRM, valve anti-reflux radio-délectable. - Usage unique
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> <b><u>Se référer au mode d'emploi.</u></b> Intubation nasale mais aussi orale le cas échéant. Utiliser le réglage d'aspiration le plus faible compatible avec le bon fonctionnement de la sonde. Irriguer la sonde avec 30ml de solution saline toutes les 1 à 2 heures pour empêcher toute occlusion.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Contrôle des hémorragies provoquées par les varices fundiques / oesophagiennes. Irrigation, drainage ou décompression de l'estomac.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Se rapporter à la notice d'emploi Patients ayant des maladies oesophagiennes (tumeurs ou diverticules).