

Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

Nom : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Nécessaire jéjunostomie

Nom commercial : Trousse de jéjunostomie

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée. Respect du délai de péremption. Vérifier l'intégrité du blister semi-rigide
5. SECURITE D'UTILISATION	
	Sécurité technique et/ou biologique : Sans latex Absence de produit d'origine animale Dispositif médical stérile mis en place par un chirurgien, au cours d'une laparotomie.
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe, (voir notice) et toujours avec une seringue d'au moins 35ml. Ne pas utiliser une pompe d'alimentation ayant une pression d'occlusion supérieure à 275 Kpa. Après avis du laboratoire pharmaceutique, il est préférable de passer par la jéjunostomie la forme injectable d'un médicament plutôt que des comprimés pilés qui risquent d'obstruer la sonde. En cas de forte traction, la sonde risque d'être dépositionnée. Il est recommandé, notamment en présence de patients agités, de réaliser des points de suture additionnels pour maintenir la sonde bien en place. Avant usage, s'assurer que le positionnement de la sonde est toujours correct en procédant à un contrôle radiologique avec un liquide de contraste hydrosoluble injecté dans la sonde.
6.2	<u>Indications :</u> Sur prescription médicale, jéjunostomie per-opératoire. Dispositif médical destiné aux patients requérant une nutrition entérale. Cette sonde permet un apport quotidien d'au moins 6000KCal (alimentation de viscosité normale). Cette sonde est utilisée pour l'administration de nutriments liquides et de médicaments dans le jéjunum des patients qui sont physiquement incapables de se nourrir normalement.
6.3	<u>Contre- indications :</u> L'utilisation de ce produit est contre-indiqué pour les patients reconnus sensibles ou allergiques à ses composants.