

## Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Tubulure pour nutrition entérale par gravité à usage unique


Nom commercial : Tubulure universelle poche souple

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée, ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 4 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.

5. SECURITE D'UTILISATION	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Usage unique</li><li>- Absence de produit d'origine animale</li></ul>

6. UTILISATION	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure. S'assurer que le connecteur cranté est bien solidarisé à la tubulure. La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Tubulure par gravité, destinée à l'administration par voie entérale de préparations nutritives et de médicaments.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Aucune

**Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume....) :**

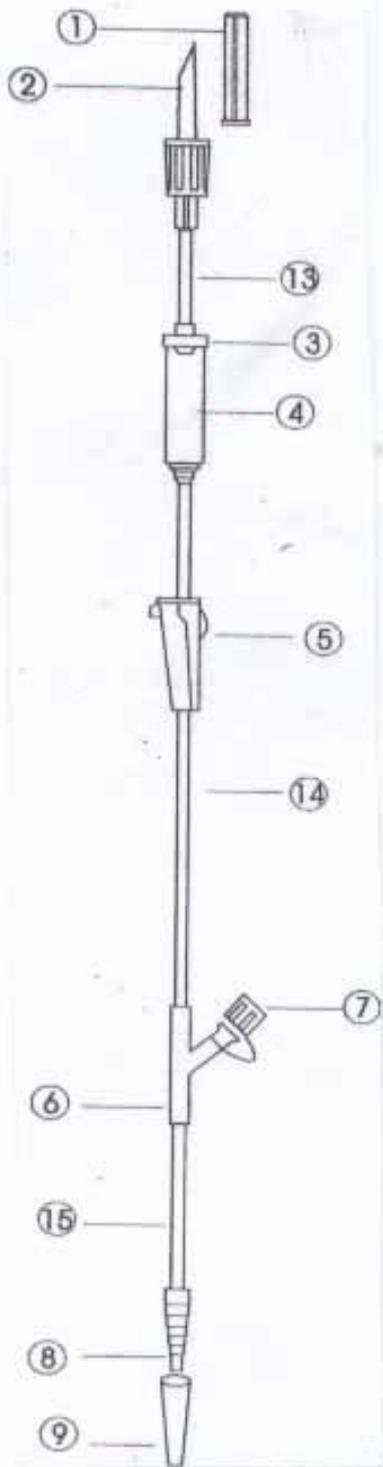

**Composition du dispositif et accessoires :**

Numéro sur le Schéma	Composants	Matériaux utilisés
1	Protecteur	Polyéthylène
2	Perforateur	ABS
3 et 4	Chambre compte-gouttes et son couvercle	PVC
5	Régulateur de débit	ABS
6	Connecteur Y femelle	PVC RIGIDE
7	Protecteur avec lien	PE
8	Embout crénelé	ABS
9	Protecteur	PE
13	Tube transparent	PVC. 3* 4,1* 10cm
14	Tube transparent	PVC. 3* 4,1* 100cm
15	Tube transparent	PVC. 3* 4,1* 20cm