

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE


Dénomination commune : Tubulure pour nutrition entérale par pompe à usage unique

Nom commercial : Tubulure trocart protégé SAFE-T-SPIKE pour nutrition entérale par pompe

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sans latex- Absence de produit d'origine animale- Usage unique- Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses par pompe. Installer soigneusement la tubulure sur la pompe comme indiqué dans le manuel de fonctionnement de la pompe S'assurer de la sécurité de montage du protecteur blanc et du connecteur étagé rouge La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
6.2	<u>Indications :</u> Alimentation entérale par pompe.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Aucune

Tubulure trocart court protégé SAFE-T-SPIKE pour nutrition entérale par pompe.

Référence : 1814 717237

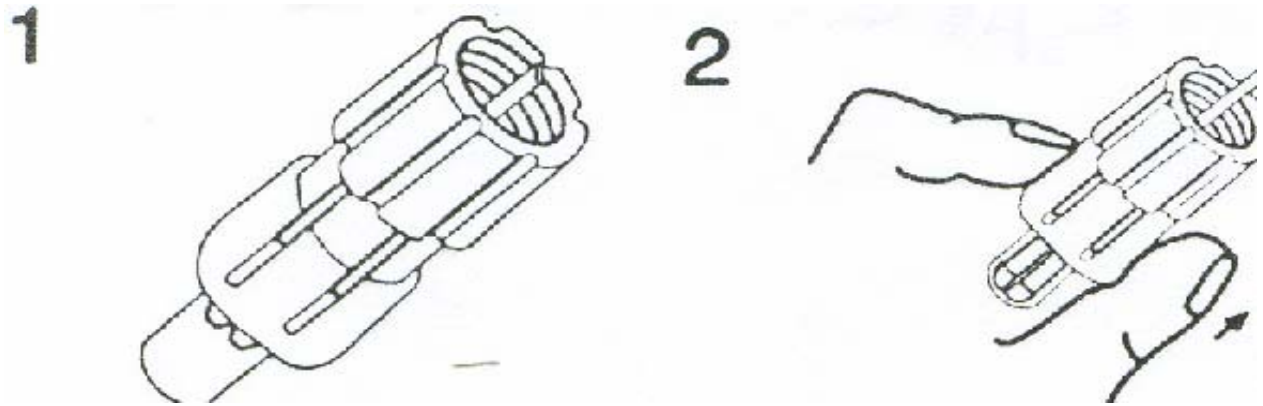

Tubulure trocart long protégé SAFE-T-SPIKE pour nutrition entérale par pompe.

Référence : 1814 717287

