

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSITIF MEDICAL**

**NOM :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Tubulure pour nutrition entérale par pompe à usage unique.

**Nom commercial :** Tubulure pour nutrition entérale par pompe pour flacons capsulés.

Système « SNAP ON » avec prise d'air + poche pour le flacon

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption Vérifier l'intégrité du protecteur individuel.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sans latex</li><li>- Absence de produit d'origine animale</li><li>- Usage unique</li><li>- Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Consommable stérile, non réutilisable, destiné à l'administration par voie entérale de préparations nutritives ou médicamenteuses. Installer soigneusement la tubulure sur la pompe comme indiqué dans le manuel de fonctionnement de la pompe S'assurer de la sécurité de montage du protecteur blanc et du connecteur étagé rouge La tubulure doit être remplacée toutes les 24 heures.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Alimentation entérale par pompe.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Aucune