

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

Nom : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Nom commercial : Sonde de Salem polyuréthane ARGYLE avec bouchons

Dénomination commune : Sonde gastroduodénale à double courant à usage unique

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 5 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> - Sans latex - Absence de produit d'origine animale - Usage unique
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Prévenir le patient, lubrifier la sonde, asseoir le patient à 20°, faire déglutir le patient lors de la progression de la sonde, vérifier le positionnement, fixer la sonde. Se référer aux bonnes pratiques infirmières.
6.2	<u>Indications :</u> Patients nécessitant une aspiration et ou un lavage et ou une nutrition et ou l'administration de médicaments..
6.3	<u>Contre- indications :</u> Selon prescription médicale, malformation des narines.