

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Sonde gastroduodénale lestée

Nom commercial : sonde d'alimentation nasojéjunale Endo-Tube

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	Sécurité technique et/ou biologique : <u>Voir Notice.</u> <ul style="list-style-type: none">- Usage unique- Sans latex, pas de composant d'origine animale.- N'accepte pas une pression de plus de 275 kpa.
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice Se référer aux bonnes pratiques infirmières. Durée maximale d'utilisation : quatre semaines. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe ...etc...(voir notice) à l'aide d'une seringue de 35ml Sonde d'alimentation insérée par voie nasale et utilisée pour administrer une formule d'alimentation entérale directement dans les intestins du patient. Ne jamais insérer le guide lorsque la sonde est dans l'organisme du patient.
6.2	<u>Indications :</u> Sonde pour l'administration de l'alimentation, des fluides, et des médicaments par voie naso-entérique Placement de la sonde sous contrôle endoscopique ou fluoroscopique par un praticien spécialisé uniquement
6.3	<u>Contre- indications :</u> Voir notice Allergie aux composants Malformations ou maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage. Ne pas utiliser chez l'enfant Ne pas réutiliser