

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Sonde gastroduodénale simple courant à usage unique

Nom commercial : Sonde de nutrition entérale pédiatrique PVC

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> <u>Voir Notice.</u> <ul style="list-style-type: none">- Usage unique- Sans latex, pas de composant d'origine animale.- Sonde à lubrifier avant la pose avec un lubrifiant soluble dans l'eau- Effectuer le remplacement de la sonde toutes les 12 à 72 heures (12 heures pour les plus petites charrières)
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Voir notice Se référer aux bonnes pratiques infirmières. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe, etc ... (voir notice) Sonde d'alimentation insérée par voie nasale / ou buccale et utilisée pour administrer une formule d'alimentation entérale directement dans l'estomac ou les intestins du patient.
6.2	<u>Indications :</u> Sonde pour l'administration de l'alimentation des fluides et des médicaments par voie naso-entérale, et la décompression chez les enfants
6.3	<u>Contre- indications :</u> Voir notice Allergie aux composants Malformations ou maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage.