

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSITIF MEDICAL**

**NOM :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Sonde naso-gastro-jéjunale UU

**Nom commercial :** Sonde d'alimentation / décompression nasojéjunale DOBBHOFF

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b>Sécurité technique et/ou biologique :</b> <b><u>Voir Notice.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usage unique</li><li>- Sans latex, pas de composant d'origine animale.</li><li>- N'accepte pas une pression de plus de 275 kpa.</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Voir notice Se référer aux bonnes pratiques infirmières. Durée maximale d'utilisation : quatre semaines. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe, etc... (voir notice) Utiliser toujours une seringue de 35ml minimum pour le rinçage Sonde d'alimentation insérée par voie nasale et utilisée pour administrer une formule d'alimentation entérale directement dans les intestins du patient. Ne jamais insérer le guide métallique dans une sonde en place dans l'organisme du patient.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Sonde pour l'administration nasoentérale de l'alimentation, des fluides, et des médicaments et pour la décompression gastrique simultanément. Placement de la sonde DOBBHOFF sous contrôle endoscopique ou fluoroscopique par un praticien spécialisé uniquement
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Voir notice Ne pas réutiliser Allergie aux composants Malformations ou maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage Ne jamais utiliser chez l'enfant