


Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

Nom : **B.Braun Medical**

Dénomination commune : **Nécessaire à transfusion par gravité**

Nom commercial : **Hemaset N**

4. Conditions de conservation et de stockage	
	Délai de péremption : 5 ans
5. Sécurité d'utilisation	
5.1	<u>Sécurité technique</u> : N/A
5.2	<u>Sécurité biologique</u> : N/A
6. Conseils d'utilisation	
6.1	<u>Mode d'emploi</u> : 1 - Ramener la pince à roulette à proximité de la chambre. Fermer la pince à roulette. Enlever le protecteur du perforateur. Introduire le perforateur dans la cheminée de la poche à sang en veillant à rester dans l'axe de la cheminée sans l'élargir. Rq : Avec les poches de sang Maco Pharma, il faut Placer <u>fermement</u> le perforateur dans le raccord de sortie puis Exercer <u>un mouvement de rotation</u> pendant l'introduction jusqu'à la perforation de la membrane. Ensuite, continuer la progression jusqu'à la première garde du perforateur (pour assurer une tenue maximum). 2 - Maintenir la chambre compte-gouttes du transfuseur en position verticale au-dessus de la poche à sang. Ouvrir la pince à roulette. Comprimer la poche à sang de façon à remplir la chambre compte-gouttes aux deux-tiers. Le filtre doit être recouvert par le dérivé sanguin à filtrer pour bénéficier de la surface filtrante optimale et éviter toute hémolyse en cas de chute sur le filtre. Maintenir la pression sur la poche à sang et fermer la pince à roulette. 3 - Suspendre la poche à sang sur la potence. 4 - Ouvrir la pince à roulette et purger lentement la tubulure. Refermer la pince à roulette. 5 - Retirer le protecteur de l'embout terminal et connecter à l'abord vasculaire. Attention : 6 - Avant de changer de poche à sang, toujours fermer la pince à roulette pour éviter une embolie gazeuse. Retirer le perforateur de la poche avec un léger mouvement tournant.

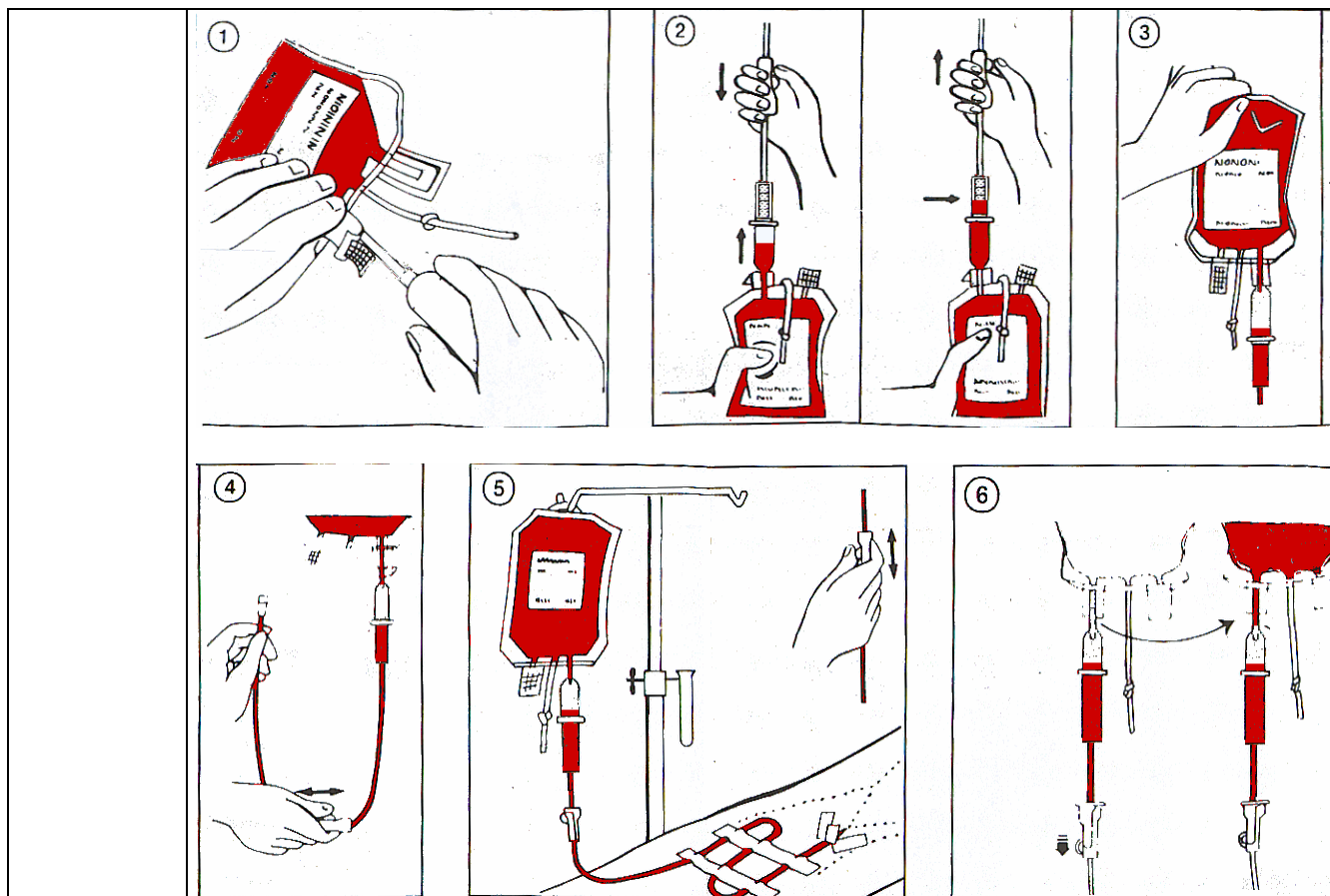

Autres recommandations :

Lors de la transfusion de concentré de globules rouges, diluer cette dernière avec par exemple une solution de 0,9 % NaCl pour obtenir un débit suffisant.

6.2 Indications :

Le filtre à sang 200 microns des transfuseurs Hemoset N est indiqué pour la transfusion de dérivés sanguins labiles présentés en poche.

6.3 Précautions d'emploi :

- En cas de risque de présence de microagrégats, préférer l'utilisation de filtres à sang de 80/40 microns de type Sangopur® pour éliminer les microagrégats.
- En cas d'utilisation sur flacon, prévoir une prise d'air séparée.

6.4 Contre-indications :

- l'utilisation sur pompe.

7. Informations complémentaires sur le produit

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc.) ... :
 Sans objet.

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

NA