

Mode d'emploi pour système manuel de contrôle d'aspiration.

1/ Connecter le système cannelé à la tubulure d'aspiration

2/ Effectuer un essai de fonctionnement (ajuster la dépression à -500 mb), pour ce faire :

- Vérifier l'absence de fuites d'air côté aspiration.
- Boucher l'orifice du couvercle avec le doigt et vérifier la fonction aspiration

3/ En cas de fuites d'air ou de légers sifflements, vérifier l'état des tubulures et augmenter la dépression jusqu'à obtenir un fonctionnement correct.

4/ Si les fuites d'air persistent ou si l'aspiration ne s'effectue pas, changer le système et recommencer l'essai.

Attention : avant chaque utilisation, vérifier le fonctionnement du système, des sécrétions importantes peuvent perturber son fonctionnement.