

BITE BLOCK

D Gebrauchsanweisung:

- Führen Sie das Produkt vor der Sedierung des Patienten ein
- Beachten Sie die richtige Position des Zungenniederhalters (nur für Beissringe mit Halteband)
- Verwenden Sie das Halteband für bessere Fixierung (nur für Beissringe mit Halteband)
- Das Produkt enthält kein Latex
- Nicht steril

Empfehlung: Produkt lichtgeschützt lagern.

GB Instruction for Use:

- Insert before the Sedation
- Check that the Tongue Pad is in the right Position (only for Bite Blocks with Head Straps)
- Apply the Head Strap for better Stability (only for Bite Blocks with Head Straps)
- The Product does not contain Latex
- Non steril

Recommendation: Store the Product under dark Conditions.

F Mode d'emploi:

- Mettre le produit en place avant la sédation du patient
- Vérifier la bonne position du baisse-langue (seulement pour des câles-dents avec courroie)
- Utiliser la courroie pour une meilleure fixation (seulement pour des câles-dents avec courroie)
- Le produit ne contient pas de latex
- Non stérile

Recommandation: Stocker le produit à l'abri de la lumière.

Packaging Content:

- ☐ REF: GAC-01-01-000: Bite Block without Head Strap
- ☐ REF: GAC-01-01-001: Bite Block with Head Strap
- ☐ REF: GAC-01-03-001: Bite Block with Head Strap



Manufactured by:
Medi-Globe GmbH
Medi-Globe-Strasse 1-5
D-83101 Achenmühle, Germany

Medi-Globe®
The Spirit of Care™

Phone: +49 (0)8032 973-379
Fax: +49 (0)8032 973-339
sales@medi-globe.de
www.medi-globe.de