


Quicktrach I

- DE** Notfall-Koniotomiebesteck
- GB** Emergency Cricothyrotomy Device
- FR** Kit de cricotomie d'urgence
- ES** Set para la coniotomía de emergencia
- IT** Set per cricotomia d'urgenza
- SE** Set för akut koniotomi

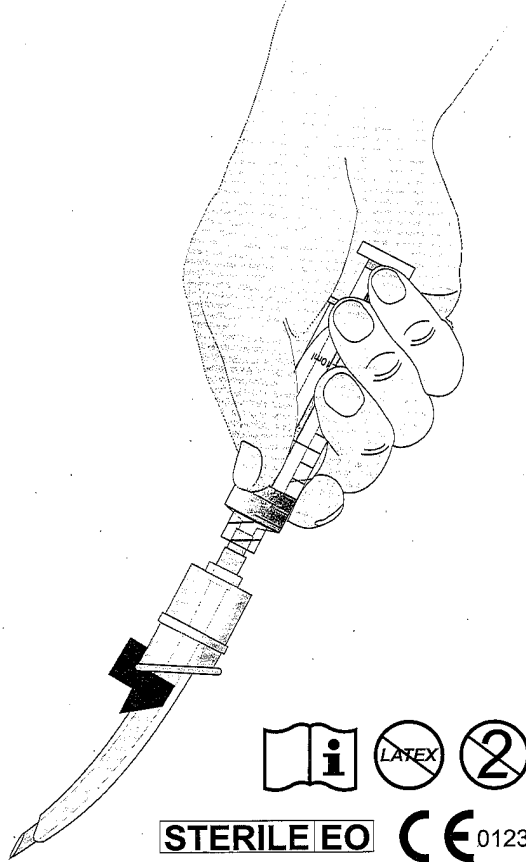

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel: +49 7454 / 95 96 0 • Fax: +49 7454 / 95 96 33
e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

Français

INDICATION:

Le Quicktrach I est un kit de cricotomie d'urgence pour la prise en charge des voies aériennes quand celles-ci présentent une obstruction dans leur partie supérieure.

AVERTISSEMENT:

Il faut lire et comprendre le mode d'emploi avant l'utilisation.

Le dispositif ne peut être utilisé que par des médecins formés à son usage.

UTILISATION:

- 1 Bien incliner la tête du patient vers l'arrière (hyperextension).

Localiser la membrane cricothyroïdienne en sentant la dépression entre le cartilage thyroïdien et le cartilage cricoïde. Stabiliser cet endroit entre le pouce et l'index pour la ponction.

Ponctionner la membrane cricothyroïdienne. L'aiguille du Quicktrach I évite l'incision préalable grâce à son embout effilé et à sa forme conique. Le stoma est créé par dilatation et ainsi on réduit le risque de saignements.

- 2 Avancer le Quicktrach I vers la trachée jusqu'à la butée. La butée permet d'éviter les incursions oesophagiennes.

Pour localiser la position de la canule aspirer l'air avec la seringue, pour s'assurer du positionnement dans la trachée.

- 3 Retirer la butée de la canule.
- 4 Faire glisser la canule plastique le long de l'aiguille jusqu'à la garde. L'aiguille sert de guide et ne doit pas être insérée plus profondément. Maintenant retirer l'aiguille.
- 5 Fixer la canule avec la lanière. Ventiler le patient à travers le raccord ISO 15mm.

ATTENTION:

Si l'aspiration d'air n'est pas possible à cause d'un cou obèse, retirer la butée et avancer la canule avec l'aiguille avec précaution jusqu'à ce qu'une aspiration d'air soit possible. Procéder selon le mode d'emploi (photo 4).

Le Quicktrach I est emballé stérile et donc ne doit être réutilisé.

Stérile, si l'emballage est fermé et intact.

