

GUIDE D'UTILISATION BISTOURIS SECURISES

Conseils d'utilisation :

- Saisir le bistouri entre le pouce et l'index.
- Simultanément, appuyer sur le bouton poussoir et faire glisser la lame vers l'extrémité du manche, jusqu'à ce qu'elle soit bloquée.
- Utiliser le bistouri sans appuyer sur le bouton poussoir pendant l'incision.

- Pour rétracter la lame provisoirement, faire glisser la commande dans le corps du
- manche, jusqu'au blocage au premier cran de la glissière. Un clic indique que la lame est provisoirement rétractée.

- Pour rétracter la lame définitivement, effectuer la même étape en faisant coulisser la
- commande jusqu'au fond du manche et ce, jusqu'au blocage définitif de la lame. Un clic indique alors que la lame est bloquée et sécurisée.

- Eliminez le bistouri rétractable à usage unique dans une boîte de récupération de déchets.

Plan d'accompagnement :

Un délégué Swann-Morton est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions techniques, sur rendez-vous présentiel ou distanciel.

Un tutoriel en vidéo est disponible sur: <https://www.swann-morton.com>