



DYNAVEN

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.


Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier, sage-femme, etc.).

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfices/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DYNAVEN Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

HOMME (bas)					
Taille	Cheville	Standard		Morpho 	
		Mollet	Cuisse	Mollet	Cuisse
S	19 – 22	32 – 39	46 – 57	24 – 32	36 – 46
M	22 – 24	35 – 42	50 – 61	27 – 35	40 – 50
L	24 – 26	38 – 45	54 – 65	30 – 38	44 – 54
XL	26 – 29	41 – 48	58 – 69	33 – 41	48 – 58

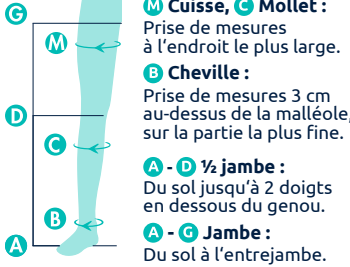

Hauteur	Jambe A-G	Pointure
Normal	≤ 79	40/43
Long	≥ 79	43/47

Guide d'entretien

Pour prolonger la vie des produits, utilisez un filet de lavage.

- ① Lavez en machine, programme délicat à 30° C.
- ② N'utilisez pas d'assouplissant.
- ③ Séchez loin de toute source de chaleur.

Le respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans cette notice, permet aux produits de compression médicale Dynaven d'assurer leur performance pendant 6 mois minimum.

Indications bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).

Aide à l'enfilage

1. Introduisez la main à l'intérieur de votre produit, pincez le talon.
2. Retournez votre produit jusqu'à hauteur du talon.
3. Introduisez votre pied dans le produit en positionnant correctement le talon.
4. Déroulez le produit sur vos jambes.

– Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

– Varices de plus de 3 mm (C2).

– Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.

– En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.