

**Dossier d'information EURO PHARMAT
DISPOSITIF MEDICAL**

NOM : TYCO HEALTHCARE FRANCE

Dénomination commune : Sonde gastro-duodénale à double courant à usage unique

Nom commercial : Sonde de Salem 100% silicone

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respect du délai de péremption 5 ans. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel avant usage. Détruire l'objet après usage.
5. SECURITE D'UTILISATION	
	<u>Sécurité technique et/ou biologique :</u> - Sans latex - Absence de produit d'origine animale - Usage unique, ne pas restériliser
6. UTILISATION	
6.1	<u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u> Prévenir le patient, lubrifier la sonde, asseoir le patient à 20°, faire déglutir le patient lors de la progression de la sonde, vérifier le positionnement, fixer la sonde. Se référer aux bonnes pratiques infirmières. Se référer au mode d'emploi.
6.2	<u>Indications :</u> La sonde de Salem en silicone est une sonde naso-gastrique à double courant destinée : - à retirer les liquides et les gaz de l'appareil gastro-intestinal (décompression) - à déterminer la quantité de pression et d'activité motrice dans l'appareil gastro-intestinal (études diagnostiques) - à traiter le patient souffrant d'obstruction mécanique et d'écoulement de sang dans la partie supérieure de l'appareil gastro-intestinal - à administrer les médicaments et la nourriture directement dans l'appareil gastro- intestinal - à obtenir un échantillon du contenu gastrique pour études en laboratoire.
6.3	<u>Contre- indications :</u> Selon prescription médicale, malformation des narines.