

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSTIF MEDICAL**

**NOM :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Sonde gastroduodénale simple courant à usage unique

**Nom commercial :** Sonde d'alimentation entérale non lestée pédiatrique INDWELL

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets. Respecter le délai de péremption.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b><u>Sécurité technique et/ou biologique :</u></b> <b><u>Voir Notice.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usage unique</li><li>- Sans latex, pas de composant d'origine animale.</li><li>- N'accepte pas une pression de plus de 275 KPa.</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b><u>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</u></b> Voir notice. Durée maximale d'utilisation : quatre semaines. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe, -etc- (voir notice) Sonde d'alimentation insérée par voie nasale et utilisée pour administrer une formule d'alimentation entérale directement dans l'estomac ou les intestins du patient. Entre les alimentations, lorsque la sonde est laissée en place, fermer le connecteur proximal avec le bouchon pour empêcher la déshydratation.
<b>6.2</b>	<b><u>Indications :</u></b> Sonde pour l'administration de l'alimentation, des fluides, et des médicaments par voie naso-entérale.
<b>6.3</b>	<b><u>Contre- indications :</u></b> Voir notice Allergie aux composants Malformations ou maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage.