

**Dossier d'information EURO PHARMAT  
DISPOSITIF MEDICAL**

**NOM :** TYCO HEALTHCARE FRANCE

**Dénomination commune :** Sonde gastroduodénale non lestée usage unique

**Nom commercial :** Sonde d'alimentation Kangaroo

<b>4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE</b>	
	Zone protégée, ne pas exposer à une température élevée ni aux ultraviolets.
<b>5. SECURITE D'UTILISATION</b>	
	<b>Sécurité technique et/ou biologique :</b> <b>Voir Notice.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usage unique</li><li>- Sans latex, pas de composant d'origine animale.</li><li>- N'accepte pas une pression de plus de 104 kpa.</li></ul>
<b>6. UTILISATION</b>	
<b>6.1</b>	<b>Mode d'emploi et précaution d'emploi :</b> Voir notice, se référer aux bonnes pratiques infirmières. Durée maximale d'utilisation : quatre semaines. Rincer fréquemment les sondes d'alimentation, avant et après chaque alimentation, administration de médicaments, à chaque débranchement du dispositif d'alimentation, à chaque arrêt de la pompe ...etc...(voir notice) Sonde d'alimentation insérée par voie nasale et utilisée pour administrer une formule d'alimentation entérale directement dans l'estomac ou les intestins du patient.
<b>6.2</b>	<b>Indications :</b> Sonde pour l'administration de l'alimentation, des fluides, et des médicaments par voie naso-entérale.
<b>6.3</b>	<b>Contre- indications :</b> Voir notice Allergie aux composants Malformations ou maladies du nez, de la gorge ou de l'œsophage.