


**DES RÉSULTATS
OPTIMAUX.
UNE RÉCUPÉRATION
RAPIDE.**

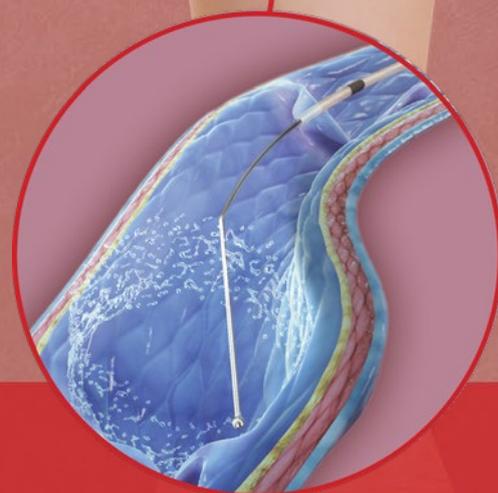

ClariVein.OC
Cathéter de perfusion

ClariVein[®] OC

Cathéter de perfusion

Le cathéter de perfusion ClariVein[®] OC novateur dispose, à son extrémité distale, d'un fil de dispersion rotatif à 360 degrés unique en son genre. Il est indiqué pour la perfusion de produits médicaux dans le système vasculaire périphérique dans le cadre du traitement endovasculaire des occlusions des veines incompetentes chez les patients souffrant de reflux veineux superficiel. ClariVein OC est à usage unique, ne requiert pas l'emploi d'énergie thermique ou la réalisation d'une anesthésie par tumescence, et peut être utilisé dans un cabinet médical. L'utilisation du cathéter ClariVein OC offre au patient l'avantage d'une douleur réduite au minimum et d'une convalescence brève. ^



Unité d'entraînement moteur


- Système d'alimentation basse tension autonome
- À usage unique (pas besoin d'investir dans un équipement réutilisable)
- Manipulation à une seule main
- Quatre vitesses de rotation du fil (allant de 2 000 à 3 500 tr/min)

Cathéter


- Cathéter de perfusion (comprend un fil rotatif avec une extrémité à bille de dispersion) assemblé à l'aide d'une cartouche pour une fixation sûre à l'unité d'entraînement moteur (UEM)
- Petit diamètre <3 French
- Cathéter de perfusion coaxial flexible
- Aisément identifiable sous guidage par imagerie vasculaire
- Conformabilité conçue pour la navigation vasculaire
- Repères de profondeur pour un retrait contrôlé
- Plusieurs longueurs de cathéters disponibles pour s'adapter à l'anatomie spécifique du patient

CONVALESCENCE ÉCLAIR. EFFICACITÉ OPTIMALE.


Utilisation du ClariVein OC

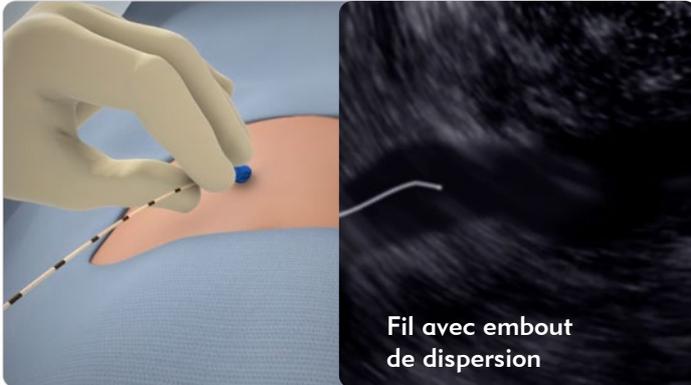

1. Le cathéter ClariVein OC est introduit de manière percutanée dans le système vasculaire périphérique sous guidage par imagerie. L'extrémité du fil de dispersion est aisément visible pour un positionnement précis dans la zone de traitement.

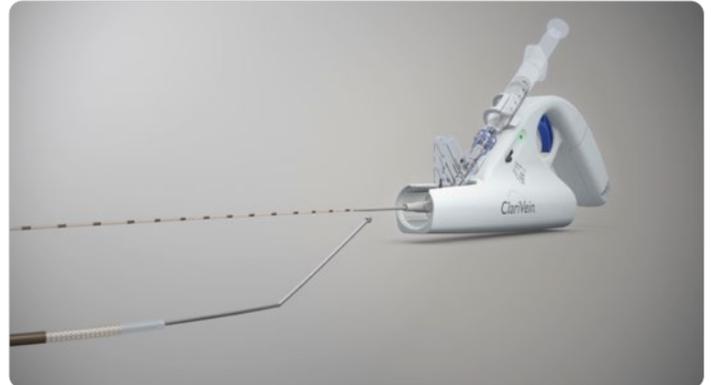

2. Le cathéter est connecté à l'unité d'entraînement moteur (UEM).

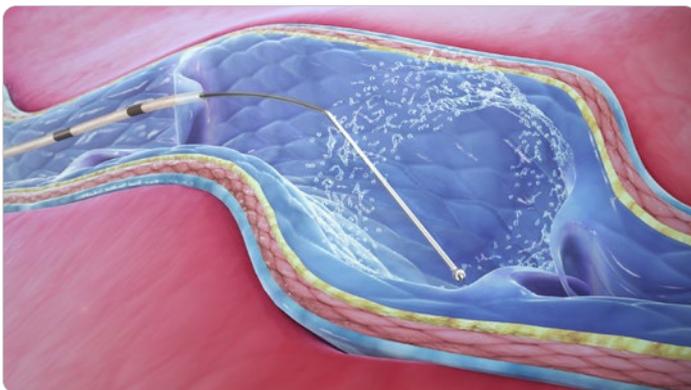

3. L'UEM entraîne une rotation du fil et de l'embout de dispersion, pour une perfusion ciblée de produits médicaux dans le système vasculaire périphérique.



4. Les patients peuvent généralement reprendre une activité normale dès la fin de l'opération.

Avantages du cathéter ClariVein OC

Le dispositif ClariVein OC est conçu pour bénéficier aux patients comme aux médecins.

AVANTAGES	MÉDECIN	PATIENT
Mini-invasif	✓	✓
Rapidité de la procédure	✓	✓
Reprise rapide d'une activité normale	✓	✓
Permet de réduire l'inconfort du patient	✓	✓
Procédure réalisée sans hospitalisation	✓	✓
Cathéter de faible diamètre s'adaptant à nombreuses tailles de vaisseaux	✓	
Réduction des coûts : Dispositif à usage unique, ne nécessite aucun entretien	✓	

ClariVein[®] OC

Cathéter de perfusion



Éléments composant le dispositif ClariVein OC

- Seringue (5 ml)
- Vanne de contrôle
- Unité d'entraînement moteur (UEM)
- Cathéter

ClariVein[®] OC
Cathéter de perfusion de produits médicaux dans le système vasculaire périphérique.
DDM 93/42/CEE Classe IIb
CE 0086 (BSI)
Fabriquée par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Informations de commande

Numéro de la pièce	Longueur du cathéter
O-45-018-E2S	45 cm
O-65-018-E4S	65 cm
O-85-018-E140S	85 cm

Packs de procédure et de micro-introduction disponibles.
Veuillez contacter le représentant commercial Merit Medical pour en savoir plus sur les disponibilités dans votre pays.

[^] Elias, S., Lam, Y. L., & Wittens, C. H. A. (2013, March). Mechanochemical Ablation (MOCA): Status and Results [greater than two years data]. *Phlebology*, Vol. 28 (suppl. 1), pp. 10-14.
DOI: 10.117/026835513477787

ClariVein OC n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.

Avant d'utiliser les dispositifs, lire attentivement les instructions d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Délivrer.

MeritEMEA.com/fr

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733