


# Outils de CRT interventionnelle

Guide avancé pour l'accès  
au sinus coronaire

Introducteur de veine  
latérale LVI Advanced

Sélecteur de veine

Kit avancé d'administration  
de produit de contraste

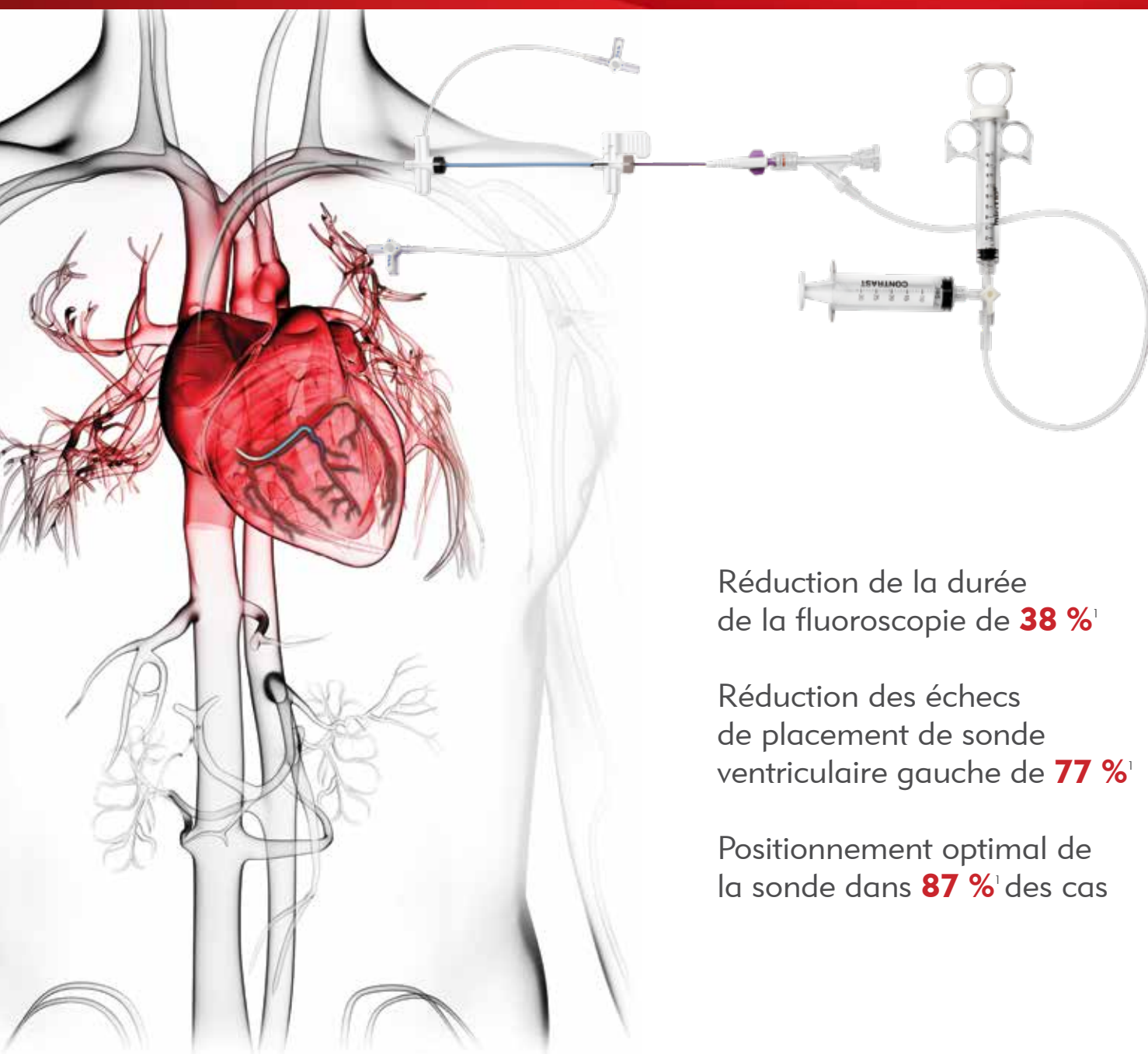

Réduction de la durée  
de la fluoroscopie de **38 %**<sup>1</sup>

Réduction des échecs  
de placement de sonde  
ventriculaire gauche de **77 %**<sup>1</sup>

Positionnement optimal de  
la sonde dans **87 %**<sup>1</sup> des cas

# Système avancé Worley™ pour la mise en place d'une sonde ventriculaire gauche

## UN ACCÈS FIABLE ET UNE MISE EN PLACE PRÉCISE

Pour répondre aux défis qui se présentent lors du traitement par resynchronisation cardiaque (CRT), vous avez besoin de systèmes perfectionnés pour la mise en place d'une sonde ventriculaire gauche vous permettant de vous adapter à la complexité de l'anatomie de votre patient. Le système Worley perfectionné pour la mise en place d'une sonde ventriculaire gauche est conçu pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin pour un positionnement fiable et précis de vos sondes ventriculaires gauches à l'emplacement ciblé.



Le **système avancé Worley pour la mise en place d'une sonde ventriculaire gauche** se compose de 4 parties principales. Chaque composant joue un rôle primordial dans le positionnement efficace et précis de votre sonde ventriculaire gauche.



**Guide avancé pour l'accès au sinus coronaire**



**Introducteur de veine latérale LVI Advanced**



**Sélecteur de veine**




**Kit d'administration de produit de contraste**


## PREUVES CLINIQUES

Dans le cadre d'une étude clinique menée à l'Université Duke auprès de 437 patients ayant reçu une implantation de CRT, deux groupes d'étude ont été comparés, un groupe utilisant un cathéter avec la technique de mise en place sur fil-guide (OTW) standard et l'autre un système de cathéter de support télescopique (TS) 9 F.<sup>1</sup>

### Réduction de la durée de la fluoroscopie 42,1 minutes vs. 26,3 minutes (p < 0,01) amélioration de 38 %

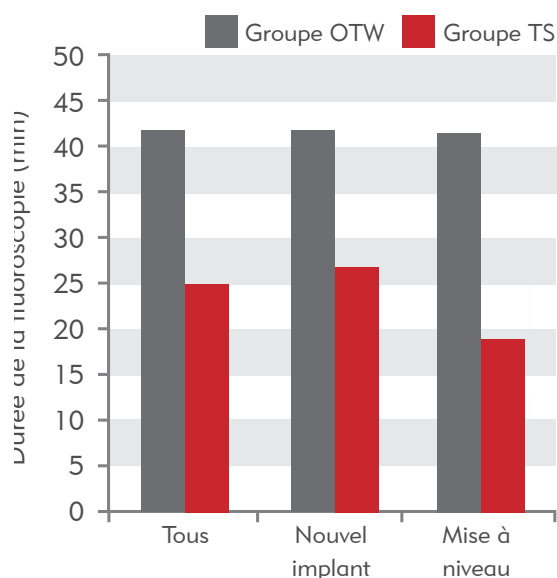

### Réduction des échecs de placement de sonde ventriculaire gauche 1,9 % vs. 8,1 % (p=0,02)

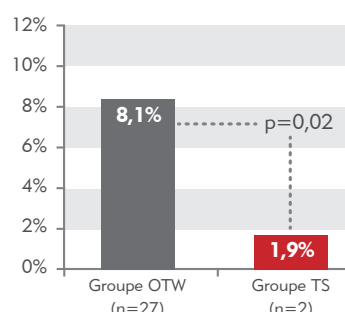

### Positionnement optimal de la sonde 87 % vs 75 % (p=0,01)

Emplacement de la sonde ventriculaire gauche conformément à la technique d'implantation

|                                     | Groupe OTW | Groupe TS | Valeur P |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Postérieur ou latéral/antérieur (%) | 92/8       | 99/1      | 0,01     |
| Basal ou moyen/apical (%)           | 82/18      | 87/13     | 0,22     |
| Optimal/non optimal (%)*            | 75/25      | 87/13     | 0,01     |

\* Emplacement optimal postérieur/latéral et basal/moyen de la sonde. Emplacement non optimal antérieur ou apical de la sonde. OTW = sur fil-guide ; TS = support télescopique.

## EN CONCLUSION

« L'approche basée sur l'implantation de CRT utilisant l'injection de produit de contraste et un système de cathéter de support télescopique entraîne une **RÉDUCTION** des échecs d'implantation de la sonde ventriculaire gauche, une **OPTIMISATION** de l'emplacement de la sonde ventriculaire gauche et une **RÉDUCTION** de la durée de la procédure. »

<sup>1</sup> Jackson, Kevin P., et al. « Impact of Using a Telescoping-Support Catheter System for Left Ventricular Lead Placement on Implant Success and Procedure Time of Cardiac Resynchronization Therapy. » Pacing and Clinical Electrophysiology 36.5 (2013): 553-558

## POSSIBILITÉS AVANCÉES POUR LA CANULATION DES SINUS CORONAIRES

La courbe unique du guide perfectionné pour l'accès au sinus coronaire Worley utilisé conjointement avec l'âme tressée vous permet de vous adapter à l'anatomie de votre patient grâce à la longueur et à la courbe du guide pour l'accès au sinus coronaire. Le cathéter interne à âme tressée peut être avancé suivant les besoins pour créer des courbes variables, réduisant ainsi le nombre de gaines nécessaires pour faciliter une implantation réussie.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La structure à forme variable de l'**ÂME TRESSÉE** offre un meilleur contrôle du couple et une flexibilité optimale

**REPÈRE DE POSITIONNEMENT EN PROFONDEUR** pour mesurer la distance de 43,5 cm entre l'extrémité de l'âme tressée et le guide pour l'accès au sinus coronaire

**VALVE HÉMOSTATIQUE PELABLE INTÉGRÉE** se manipule comme un introducteur pelable standard pour limiter les risques de pertes de sang et d'embolie gazeuse


**PORT LATÉRAL** permet un accès libre pour les perfusions et l'injection de produit de contraste durant l'implantation

**GAINE PEBAX® RÉSISTANTE AUX IMPACTS** avec une âme tressée réduit les plicatures et permet un retrait facilité

**Diamètre interne de 9 French** offre un grand espace pour réaliser diverses techniques avancées d'implantation de CRT

**EMBOUT RADIOPAQUE SOUPLE** conçu pour réduire le risque de traumatisme vasculaire et améliore la visualisation sous fluoroscopie

**INTRODUCTEUR À PLUSIEURS ANGLES** pour un meilleur placement de sonde ventriculaire gauche

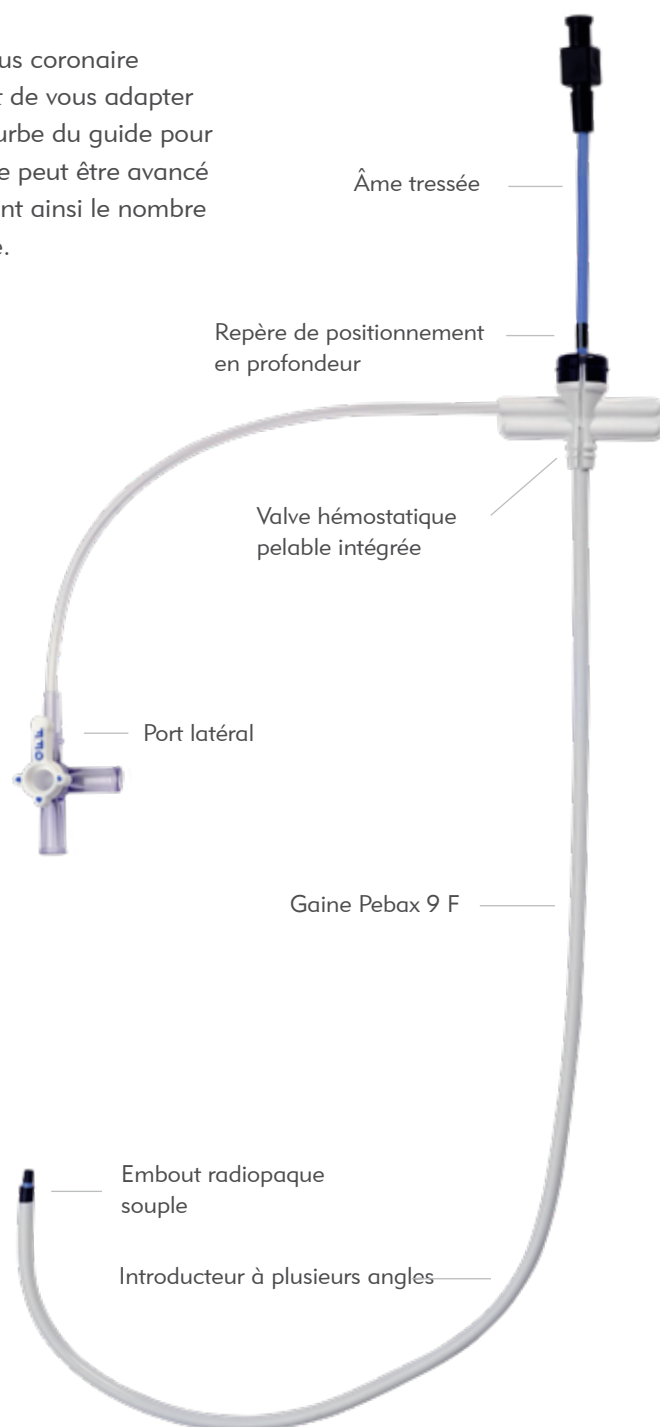

### Guide Avancé WORLEY™

Fil-guide pour l'accès au sinus coronaire

DDM 93/42/CEE Classe III

CE 0344 (DEKRA)

Fabriqué par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande

(Pebax® est une marque commerciale déposée d'Arkema Group)





## Valve hémostatique pelable intégrée

- Valve intégrée et conception du raccord pour une manutention comme un introducteur pelable standard
- Minimise le risque de déplacement ou de dégagement de la sonde pendant le retrait du cathéter
- Offre une séparation aisée de la gaine de pose sans nécessiter de dispositif de coupe distinct

## TROIS TAILLES

| Taille   | Longueur | Usage                                             |
|----------|----------|---------------------------------------------------|
| Standard | 40 cm    | Pour l'anatomie coronaire normale                 |
| Jumbo    | 50 cm    | Grande courbe pour un élargissement atrial marqué |
| Long     | 50 cm    | Positionnement profond et support d'extrémité     |

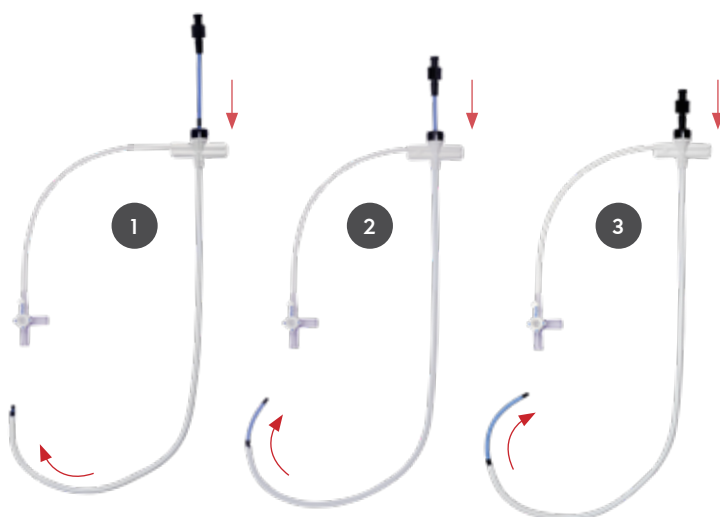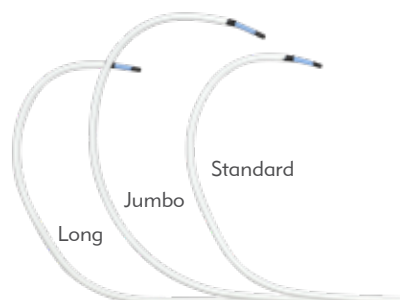

## Structure à forme variable de l'âme tressée

- Réduit le nombre de gaines nécessaires pour faciliter une implantation réussie
- Embout radiopaque pour une meilleure visualisation sous fluoroscopie
- Le cathéter interne peut être avancé suivant les besoins, à une distance maximale de 6,5 cm de l'entrée pour davantage de facilité
- Canulation du sinus coronaire dans différentes anatomies
- Meilleur contrôle du couple par rapport au guide pour l'accès au sinus coronaire extrudé
- Repère proximal noir pour un guidage en profondeur et un positionnement précis

## GUIDE PERFECTIONNÉ POUR L'ACCÈS AU SINUS CORONAIRE

| Numéro de la pièce | Longueur | Taille | Courbe   | Externe Diamètre | Interne Diamètre | De l'embout Diamètre |
|--------------------|----------|--------|----------|------------------|------------------|----------------------|
| WOR-CSG-B1-09      | 40 cm    | 9 F    | Standard | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-BL1-09     | 50 cm    | 9 F    | Standard | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-B2-09      | 50 cm    | 9 F    | Jumbo    | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-BR1-09     | 40 cm    | 9 F    | Droite   | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |

### CONTENU DU KIT

#### Fil-guide en PTFE :

Longueur 135, angle 45°,  
embout en J 0,035" x 135 cm

#### Âme de guidage courbe :

introducteur 9 F, DE 0,118", DI 0,095",  
embout 0,092"


#### Dilatateur de vaisseau droit :

insertion transvalvulaire DI 0,038"

**Outils (ITV) :** 1,75", 7 F, DE 0,117", DI 0,097"

**Aiguille :** 2,75", 18 G

**Seringue**

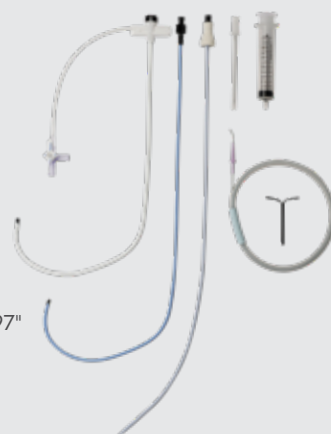

# Introducteur de veine latéral LVI Advanced Worley™

## IMPLANTATION DE SONDE VENTRICULAIRE GAUCHE EFFICACE ET RÉUSSIE

Lorsqu'il est utilisé conjointement avec le guide avancé pour l'accès au sinus coronaire Worley et le sélecteur de veine Worley, l'introducteur de veine latérale LVI Advanced Worley fournit les outils et les solutions nécessaires pour réduire la durée de l'implantation, faciliter l'accès au vaisseau cible et améliorer les chances de réussite de l'implantation de CRT.<sup>1</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**STRUCTURE TRESSÉE DE LA GAINÉ** offre un meilleur contrôle du couple et une plus grande stabilité. Gaine pelable pour un retrait facilité.

**EMBASE HÉMOSTATIQUE SÉCABLE INTÉGRÉE ET POIGNÉE** conçues pour empêcher la perte de sang et l'embolie gazeuse. L'embase ne nécessite aucune découpe. La prise en main sécurisée de l'embase permet de réduire le risque de dégagement de la sonde pendant le retrait.

**EMBOUT RADIOPAQUE SOUPLE** conçu pour réduire le risque de traumatisme du vaisseau et améliorer la visualisation sous fluoroscopie.


**COURBES PROXIMALES ET DISTALES** améliorent l'accès sous-sélectif aux branches veineuses latérales inclinées.

**SÉLECTEUR DE VEINE CIBLE DE 5 F** favorise la LVI pour une sélection de la veine cible et un positionnement du fil-guide optimaux.

**INTRODUCTEUR DE VEINE LATÉRALE DI 5,5 F OU 7 F** favorise considérablement la stimulation des sondes et offre un grand espace pour réaliser diverses techniques perfectionnées d'implantation de CRT.

**STRUCTURE DE LA COURBE PROXIMALE DU MULTI-DUROMÈTRE** optimise la directivité de l'embout.

**PORT LATÉRAL** permet un accès libre pour les perfusions et l'injection de produit de contraste durant le déplacement de la sonde d'implantation lors du retrait.

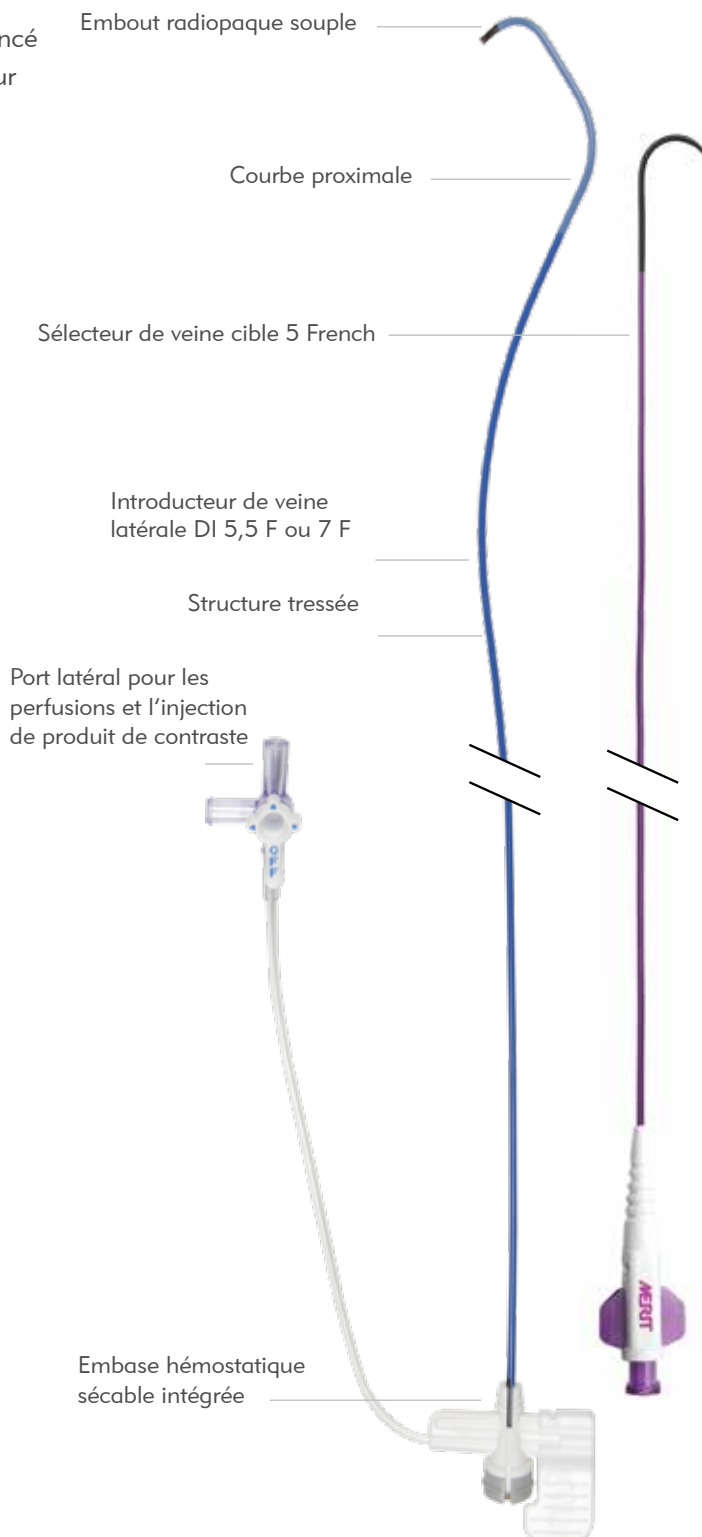



## Valve intégrée et conception du raccord

- La valve de protection offre un accès direct à la trancheuse pour insérer la structure tressée
- La prise surdimensionnée réduit le risque de déplacement de la sonde
- La trancheuse facile à utiliser s'adapte à l'embase d'accès au sinus coronaire pour une stabilité accrue lors du retrait de la gaine

## INTRODUCTEUR DE VEINE LATÉRAL LVI ADVANCED WORLEY™

| Número de la pièce                         | Longueur | Externe<br>Diamètre | Interne<br>Diamètre | Description      |
|--------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Introduceur de veine latérale 7 F</b>   |          |                     |                     |                  |
| WORLVI-75-5-62-07-RE                       | 62 cm    | 0,120"              | 0,090"              | Rénale           |
| WORLVI-75-5-62-07-HS                       | 62 cm    | 0,120"              | 0,090"              | Crosse de hockey |
| WORLVI-75-5-62-07-HO                       | 62 cm    | 0,120"              | 0,090"              | Crochet          |
| WORLVI-75-5-62-07-MP                       | 62 cm    | 0,120"              | 0,090"              | Usages multiples |
| <b>Introduceur de veine latérale 5,5 F</b> |          |                     |                     |                  |
| WORLVI-75-5-62-55-RE                       | 62 cm    | 0,088"              | 0,072"              | Rénale           |
| WORLVI-75-5-62-55-HS                       | 62 cm    | 0,088"              | 0,072"              | Crosse de hockey |
| WORLVI-75-5-62-55-HO                       | 62 cm    | 0,088"              | 0,072"              | Crochet          |
| WORLVI-75-5-62-55-MP                       | 62 cm    | 0,088"              | 0,072"              | Usages multiples |

## LVI Advanced WORLEY™

Introduceur de veine latérale pour sondes coronaires

DDM 93/42/CEE Classe III

CE 0344 (DEKRA)

Fabriqué par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande

## **Courbe rénale**

*Pour les anatomies veineuses coronaires les plus communes*



## **Courbe à usages multiples**

*Pour les autres anatomies veineuses coronaires*



## **Courbe en crosse de hockey**

*Pour les anatomies veineuses coronaires plus larges*



## **Courbe en forme de crochet**

*Pour les anatomies veineuses coronaires plus petites et difficiles*



# Sélecteur de veine Worley™

Le sélecteur de veine Worley est conçu pour aider au positionnement de la sonde ventriculaire gauche grâce à ses principales fonctionnalités : une embase en accordéon unique pour minimiser les plicatures et optimiser l'orientation, une âme tressée exclusive pour améliorer la flexibilité et une pointe biseautée douce pour réduire les traumatismes vasculaires. Le sélecteur de veine Worley est également facilement visible sous fluoroscopie.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### EMBASE EN ACCORDÉON UNIQUE

pour minimiser les plicatures et optimiser l'orientation

ÂME TRESSÉE EXCLUSIVE pour améliorer la flexibilité

### POINTE BISEAUTÉE DOUCE

conçue pour réduire les traumatismes vasculaires

FACILEMENT VISIBLE sous fluoroscopie

### OPTIMISATION DE L'EMPLACEMENT

de la sonde ventriculaire gauche.<sup>1</sup>



Visibilité accrue pour un accès fiable à la veine cible



L'embase à ailettes ergonomique contribue à la maniabilité et au contrôle

## SÉLECTEUR DE VEINE WORLEY

| Numéro de la pièce | Taille (en French) | DI             | Longueur | Courbe     |
|--------------------|--------------------|----------------|----------|------------|
| 57538CS-WOR        | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Standard   |
| 57538CSV-WOR       | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Vertébrale |
| 57538CSHK-WOR      | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Crochet    |

<sup>1</sup> Jackson KP, Hegland DD, Frazier-Mills C, Piccini JP, Koontz JJ, Atwater BD, Daubert JP, Worley SJ. Impact of using a telescoping-support catheter system for left ventricular lead placement on implant success and procedure time of cardiac resynchronisation therapy. *Pacing Clin Electrophysiol.* Mai 2013 ; 36(5):553-8.

### Sélecteur de veine WORLEY™

DDM 93/42/CEE Classe I stérile

CE 0086 (BSI)

Fabriqué par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande



# Kit avancé d'administration de produit de contraste Worley™

## VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS

L'insertion des dispositifs de traitement par resynchronisation cardiaque (CRT) nécessite un positionnement précis, rapide et efficace des sondes ventriculaires gauches. Les kits d'administration de produit de contraste Worley de Merit Medical contiennent tous les produits dont vous avez besoin pour bénéficier d'une visibilité claire et durable de l'anatomie veineuse coronaire. Le kit d'administration de produit de contraste Worley offre une visibilité en temps réel lors de l'implantation de CRT pour un positionnement amélioré de la sonde ventriculaire gauche.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**SERINGUES MEDALLION®** Fabriquées en polycarbonate résistant avec une surface lisse et transparente similaire au verre pour une visibilité et un contrôle améliorés.

**SERINGUE DE CONTRÔLE CORONAIRE INJECTION™** DI de cylindre plus petit réduit la fatigue manuelle et nécessite moins de force pour générer une pression élevée pendant les injections.

**VALVE HÉMOSTATIQUE** Maintient l'hémostase sans compromettre les mouvements du cathéter ou la restriction du flux de contraste.

**ROBINET** Conçu pour faciliter l'utilisation et vous apporter de la confiance lorsque vous devez arrêter et rétablir le flux durant la procédure.

**TUBULURE HP** Tubulure en PVC transparente conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la procédure.


**ACCESSOIRES** Des étiquettes et une cupule complètent le kit avancé d'administration de produit de contraste avec les accessoires dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière de sécurité.



### KIT AVANCÉ D'ADMINISTRATION DE PRODUIT DE CONTRASTE WORLEY KIT D'ADMINISTRATION DE PRODUIT DE CONTRASTE

| Numéro de la pièce | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| K12-WORLEY1        | Kit avancé d'administration de produit de contraste Worley 1 |
| K12-WORLEY2        | Kit d'administration de produit de contraste Worley 2        |

K12-WORLEY1

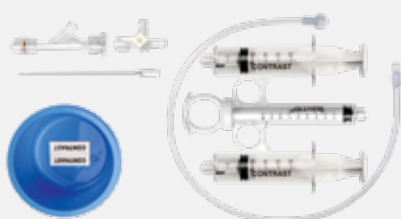

K12-WORLEY2



#### Kit d'administration de produit de contraste WORLEY™

DDM 93/42/CEE Classe IIa

CE 0086 (BSI)

Fabriqués par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande

## ONE Snare®

### Système de lasso endovasculaire

Le système ONE Snare est un lasso à simple boucle conçu pour assurer à la fois précision et fiabilité lors de la manipulation et l'extraction efficaces de corps étrangers. Système destiné à être utilisé avec les techniques du lasso antidromiques et orthodromiques.

Le nitinol super-élastique assure la flexibilité et la résistance à la plicature au niveau du cathéter. Le tungstène plaqué or enveloppe la boucle de nitinol pour permettre une excellente visualisation sous fluoroscopie.

Conçu pour mieux capturer les corps étrangers avec une boucle à 90°

La boucle en nitinol et en tungstène plaqué or permet de conserver la forme circulaire du lasso pour favoriser la capture des corps étrangers

Cathéter résistant à la plicature conçu pour optimiser la résistance et assurer la réussite de la procédure

Excellent support du câble central en nitinol qui mémorise la forme et offre une super-élasticité

#### SYSTÈME DE LASSO ENDOVASCULAIRE ONE SNARE®

| Numéro de la pièce | Description                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|
| ONE1000            | 4F ONE Snare, boucle 10 mm, longueur 120 cm |

#### One Snare® Système de lasso endovasculaire


Cathéters et anses pour la capture et manipulation de corps étrangers dans le système cardiovasculaire  
DDM 93/42/CEE Classe III  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqués par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

## Merit Laureate®

### Fil-guide hydrophile


Conçu pour offrir une véritable réponse du couple 1:1 afin de faciliter la navigation et la sélection rapide des vaisseaux.

#### Cathéter sans couple 1:1

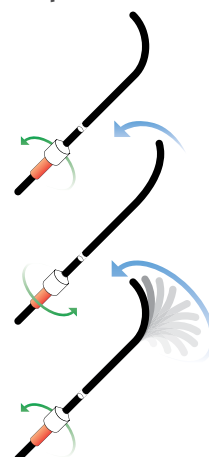

Sans couple 1:1, la réactivité est lente et suivie par un déplacement excessif.

#### Merit Laureate

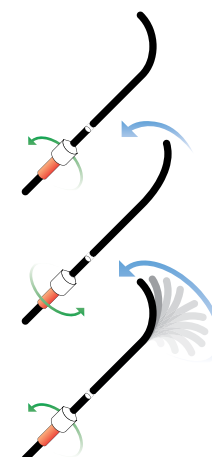

Le fil-guide Merit Laureate offre une réactivité tour à tour (couple 1:1).

#### FIL-GUIDE HYDROPHILE MERIT LAUREATE®

| Numéro de la pièce | Description                              |
|--------------------|------------------------------------------|
| LWSTDA3580         | Fil-guide, 0,035", 80 cm, embout courbé  |
| LWSTDA35150        | Fil-guide, 0,035", 150 cm, embout courbé |
| LWSTDA35180        | Fil-guide, 0,035", 180 cm, embout courbé |
| LWSTDA1880         | Fil-guide, 0,018", 80 cm, embout courbé  |
| LWSTDA18150        | Fil-guide, 0,018", 150 cm, embout courbé |
| LWSTDA18180        | Fil-guide, 0,018", 180 cm, embout courbé |

#### Merit Laureate®

Fil-guide hydrophile  
DDM 93/42/CEE Classe IIa  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

## DiamondTOUCH™

### Dispositif d'inflation numérique

Le dispositif DiamondTOUCH dispose de meilleures capacités pour l'inflation. Avec une capacité de pression de 35 bar et un volume de seringue de 30 mL, le dispositif DiamondTOUCH est idéal pour les laboratoires interventionnels utilisant des ballonnets haute pression d'un grand volume. Doté de fils plus larges et d'une poignée pour un déblocage rapide, le dispositif DiamondTOUCH offre une inflation et un dégonflage rapides.



#### DISPOSITIF D'INFLATION NUMÉRIQUE DiamondTOUCH™

| Numéro de la pièce | Description |
|--------------------|-------------|
| IN9135             | 35 ATM/BAR  |

#### DiamondTOUCH™

Dispositif d'inflation numérique pour ballonnets d'angioplastie  
DDM 93/42/CEE Classe Im  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

## Merit SureCross®

### Cathéter de support

Conçu pour optimiser la progression et la flexibilité, maximisant le support de fil, le suivi et le franchissement de lésions.



#### CATHÉTER DE SUPPORT MERIT SURECROSS®

| Numéro de la pièce | Diamètre fil-guide | Longueur effective | Longueur du revêtement hydrophile | Espacement des bandes de repérage | Profil de l'embout |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| SC1490             | 0,014" (0,36 mm)   | 90 cm              | 40 cm                             | 15 mm                             | 0,020"             |

#### Merit SureCross®

Cathéter de support  
DDM 93/42/CEE Classe III  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

## Merit Maestro®

### Microcathéter


Microcathéter à usages multiples avec tressage de ruban en nylon qui permet une progression et un suivi excellents, et un bon redressement après les torsions lors de la traversée de petits vaisseaux tortueux.

#### MICROCATHÉTER MERIT MAESTRO®

| Numéro de la pièce | Description                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 28MC2411OST        | Proximal 2,8 F Distal 2,4 F, embout droit 110 cm |

#### Merit Maestro®

Microcathéter pour procédures d'embolisation  
DDM 93/42/CEE Classe III  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

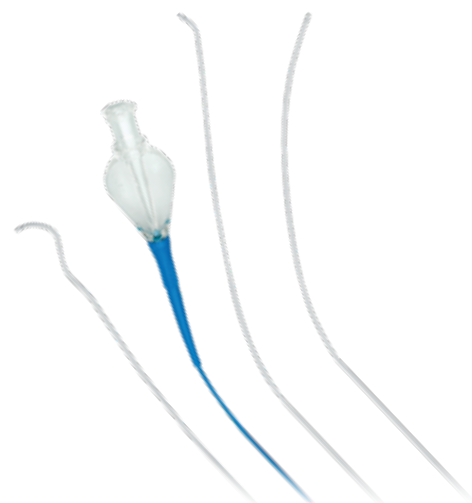

# Informations de commande

## GUIDE AVANCÉ POUR L'ACCÈS AU SINUS CORONAIRE

| Numéro de la pièce | Longueur | Taille | Courbe   | Externe Diamètre | Interne Diamètre | De l'embout Diamètre |
|--------------------|----------|--------|----------|------------------|------------------|----------------------|
| WOR-CSG-B1-09      | 40 cm    | 9 F    | Standard | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-BL1-09     | 50 cm    | 9 F    | Standard | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-B2-09      | 50 cm    | 9 F    | Jumbo    | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |
| WOR-CSG-BR1-09     | 40 cm    | 9 F    | Droite   | 0,157"           | 0,130"           | 0,122"               |

## INTRODUCTEUR DE VEINE LATÉRALE LVI ADVANCED WORLEY

| Numéro de la pièce   | Longueur | Externe Diamètre | Interne Diamètre | Description      |
|----------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>LVI 7 F</b>       |          |                  |                  |                  |
| WORLVI-75-5-62-07-RE | 62 cm    | 0,120"           | 0,090"           | Rénale           |
| WORLVI-75-5-62-07-HS | 62 cm    | 0,120"           | 0,090"           | Crosse de hockey |
| WORLVI-75-5-62-07-HO | 62 cm    | 0,120"           | 0,090"           | Crochet          |
| WORLVI-75-5-62-07-MP | 62 cm    | 0,120"           | 0,090"           | Usages multiples |
| <b>LVI 5,5 F</b>     |          |                  |                  |                  |
| WORLVI-75-5-62-55-RE | 62 cm    | 0,088"           | 0,072"           | Rénale           |
| WORLVI-75-5-62-55-HS | 62 cm    | 0,088"           | 0,072"           | Crosse de hockey |
| WORLVI-75-5-62-55-HO | 62 cm    | 0,088"           | 0,072"           | Crochet          |
| WORLVI-75-5-62-55-MP | 62 cm    | 0,088"           | 0,072"           | Usages multiples |

## SÉLECTEUR DE VEINE WORLEY

| Numéro de la pièce | Taille (en French) | DI             | Longueur | Courbe     |
|--------------------|--------------------|----------------|----------|------------|
| 57538CS-WOR        | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Standard   |
| 57538CSV-WOR       | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Vertébrale |
| 57538CSHK-WOR      | 5 F                | .046"/ 1,17 mm | 75 cm    | Crochet    |

## KIT AVANCÉ D'ADMINISTRATION DE PRODUIT DE CONTRASTE WORLEY KIT D'ADMINISTRATION DE PRODUIT DE CONTRASTE

| Numéro de la pièce | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| K12-WORLEY1        | Kit avancé d'administration de produit de contraste Worley 1 |
| K12-WORLEY2        | Kit d'administration de produit de contraste Worley 2        |

## SYSTÈME DE LASSO ENDOVASCULAIRE ONE SNARE®

| Numéro de la pièce | Description                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|
| ONE1000            | 4F ONE Snare, boucle 10 mm, longueur 120 cm |

## FIL-GUIDE HYDROPHILE MERIT LAUREATE®

| Numéro de la pièce | Description                              |
|--------------------|------------------------------------------|
| LWSTDA3580         | Fil-guide, 0,035", 80 cm, embout courbé  |
| LWSTDA35150        | Fil-guide, 0,035", 150 cm, embout courbé |
| LWSTDA35180        | Fil-guide, 0,035", 180 cm, embout courbé |
| LWSTDA1880         | Fil-guide, 0,018", 80 cm, embout courbé  |
| LWSTDA18150        | Fil-guide, 0,018", 150 cm, embout courbé |
| LWSTDA18180        | Fil-guide, 0,018", 180 cm, embout courbé |

## DISPOSITIF D'INFLATION NUMÉRIQUE DIAMONDTouch™

| Numéro de la pièce | Description |
|--------------------|-------------|
| IN9135             | 35 ATM/BAR  |

## CATHÉTER DE SUPPORT MERIT SURECROSS®

| Numéro de la pièce | Diamètre du fil-guide | Longueur effective | Longueur du revêtement hydrophile | Espacement des bandes de repérage | Profil de l'embout |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| SC1490             | 0,014" (0,36 mm)      | 90 cm              | 40 cm                             | 15 mm                             | 0,020"             |

## MICROCATHÉTER MERIT MAESTRO®

| Numéro de la pièce | Description                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 28MC2411OST        | Proximal 2,8 F Distal 2,4 F, embout droit 110 cm |

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

merit.com

Merit Medical France  
Centre d'affaires du  
Parc des Lumières  
46, avenue des Frères Lumière  
78190 Trappes, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,  
Moyen-Orient et Afrique (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199  
AE Maastricht-Airport  
Pays-Bas  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlande  
+353 (0) 91 703 733

401666003\_002 ID 102824