

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

LAME DE MYRINGOTOMIE STERILE

Mode d'emploi :

Déchirer délicatement le feuillet métallique, saisir le talon de la lame avec une pince stérile.
La monter et la démonter sur un manche avec une pince stérile.
A utiliser avec des gants stériles ou avec un manche « FINE ».

Précautions d'emploi :

Objet tranchant dangereux.
Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Dispositif stérile à usage unique.
Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.
Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com & administratif@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08