

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

MANCHE DE BISTOURI INOX

Mode d'emploi :

Les manches sont lavables en machines à laver standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame. Ils résistent à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.

Précautions d'emploi :

Instrument Chirurgical non stérile
Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.
Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com & administratif@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08