

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

COUPE-FIL STERILE

Mode d'emploi :

Le produit s'utilise directement sans manche, déchirer délicatement le feuillet métallique, saisir le talon de la lame avec une pince stérile ou des gants stériles.

Précautions d'emploi :

Objet tranchant dangereux.

Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Dispositif stérile à usage unique.

Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.

Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08