

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - SECURITE - UTILISATION

COUPE-FIL SECURISE STERILE A LAME RETRACTABLE

Mode d'emploi :

Le Coupe-fil sécurité, composé d'un manche et d'une lame rétractable par un bouton poussoir.
Conçu pour protéger le personnel des AES.

2 Positions :

- L'une permet de libérer la lame du capuchon protecteur lors de l'intervention chirurgicale
- L'autre permet de rétracter le capuchon protecteur sur la lame pour sécuriser le personnel pendant la transmission du dispositif

Précautions d'emploi :

Objet tranchant dangereux.

Dispositif réservé aux professionnels de santé habilités.

Information complémentaire :

Dispositif stérile à usage unique.

Après utilisation, à éliminer dans un contenant DASRI.

Origine :

Matières premières provenance d'Européenne.

Dispositif entièrement fabriqué et stérilisé en Grande-Bretagne.

Questions :

Pour toute question sur les Dispositifs Swann-Morton, contacter :

- Par e-mail: marches@swann-morton-sinner.com
- Par téléphone : 04 42 29 08 08