



## Guide d'informations importantes sur le produit



### Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd.

**Address** No. 18, Nishang Road, LiangLu Industrial City  
401120 Yubei District, Chongqing, China

**Tel** 0086-23-86098099

**Website** [www.jinshangroup.com/en](http://www.jinshangroup.com/en)

**Email** [service@jinshangroup.com](mailto:service@jinshangroup.com)




Emergo Europe  
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



Imported by: Asept InMed SAS  
9, Avenue Mercure 31130 Quint Fonsegrives.  
Tel 05.62.57.69.00 - Fax 05.62.57.69.01  
[www.aseptinmed.fr](http://www.aseptinmed.fr)



CA006-DY005 v1.0 Jan. 11, 2023

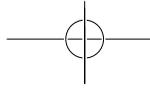

## Specification produit

Model: CC1  
Temperature utilisation: 5°C~40°C  
Temperature stockage: 0°C~50°C

Voltage: 3V ---  
Temps d'utilisation: 10h  
Validité: 14 mois

## Indications

Applicable à tous les adultes.  
Conçu pour l'inspection de la muqueuse colique.

## Contre-indication et precaution

La capsule intelligente OMOM CC est contre-indiquée pour une utilisation dans les conditions suivantes:

Chez les patients confirmés ou suspectés d'anomalies, d'obstruction, de perforation, sténose ou fistule.

Chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques implantés ou d'autres dispositifs électromédicaux.

Chez les patients souffrant de dysphagie ou d'autres troubles de la déglutition.

Chez les patients atteints d'entérite aiguë ou de carence en fer sévère, par ex. dysenterie bacillaire aiguë, colite ulcéreuse aiguë surtout avec des symptômes fulminants.

Chez les patients allergiques aux matériaux polymères.

Chez les femmes enceintes.

Utiliser avec prudence dans les conditions suivantes:

Chez les patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans.

Chez les patients confirmés ou suspectés de psychopathie.

## Préparation et administration

Une préparation intestinale standard est nécessaire avant la procédure. La gélule doit être administrée sous la surveillance d'un médecin.

## Ingestion de la capsule

Procédez comme suit lors de l'ingestion de la capsule:

1. Retirez la boîte d'emballage de l'emballage Tyvek.
2. Retirez le couvercle de la boîte d'emballage.

3. Retirez la capsule et prenez une photo du visage du patient avec l'appareil photo à capsule.

4. Ingérer la capsule avec de l'eau.

## Notes

La capsule est stérilisée. Portez des gants avant de toucher la capsule. La capsule est emballée dans une boîte dont le couvercle est muni d'un aimant qui empêche toute activation accidentelle de la capsule. N'utilisez pas la capsule si elle est endommagée.

Ne pas utiliser la capsule si l'emballage est endommagé.

Pour l'activer, retirez simplement le couvercle de la boîte d'emballage, la capsule devrait alors commencer à clignoter.

Pour désactiver, placez la capsule dans la fente, placez le logo vers le haut et couvrez le couvercle, cela devrait arrêter le clignotement.

Si le clignotement ne s'arrête pas, faites pivoter la capsule le long de l'axe et couvrez le couvercle.

Répétez ce processus jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.

## Informations réglementaires



Marquage CE

IPX8

Protection contre les infiltrations: 8



Usage unique

STERILEEO

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Ecologique et recyclable



Type d'appareil BF

*Pour obtenir la dernière version de ce guide d'informations importantes sur les produits, contactez votre distributeur.*

