

 **WOW HD** Smart Capsule

Guide d'informations importantes sur le produit

**Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd.**

Address No. 18, Nishang Road, LiangLu Industrial City
401120 Yubei District, Chongqing, China

Tel 0086-23-86098099

Website www.jinshangroup.com/en

Email service@jinshangroup.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

Imported by: Asept InMed SAS
9, Avenue Mercure 31130 Quint Fonsegrives.
Tel 05.62.57.69.00 - Fax 05.62.57.69.01
www.aseptinmed.fr



CA007-DY005 v1.0 Jan. 11, 2023

Specification produit

Model: SC100
Temperature: 5°C~40°C
Temperature stockage: 0°C~50°C

Voltage: 3V ===
Temps d'utilisation: 12h
Validité: 14 mois

Indications

Applicable à tous les adultes.
Conçu pour l'inspection de la muqueuse gastro-intestinale. Il peut également être utilisé pour visualiser les éléments suivants:
Les lésions qui peuvent indiquer la maladie de Crohn, les saignements intestinaux, l'anémie.

Contre indication et précaution

L'utilisation de la capsule intelligente OMOM HD est contre-indiquée dans les conditions suivantes:
Chez les patients présentant de manière confirmée ou suspectée des anomalies, une obstruction, une perforation, une sténose ou une fistule.
Chez les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif électromédical.
Chez les patients souffrant de dysphagie ou d'autres troubles de la déglutition.
Chez les patients présentant une entérite aiguë ou une carence en fer sévère, par exemple dysenterie bacillaire aiguë, colite ulcéreuse aiguë, en particulier avec des symptômes fulgurants.
Chez les patients allergiques aux matériaux polymères.
Chez les femmes enceintes.
Utiliser avec précaution dans les conditions suivantes:
Chez les patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans.
Chez les patients confirmés ou suspectés de psychopathie.

Preparation et administration

Une préparation intestinale standard est requise avant la procédure.
La capsule doit être administrée sous la supervision d'un médecin.

Ingestion de la capsule

Faites ce qui suit lors de l'ingestion de la capsule:
1. Retirez la boîte de l'emballage Tyvek.
2. Retirez le couvercle de la boîte d'emballage.

3. Retirez la capsule et prenez une photo du visage du patient avec l'appareil photo de la capsule.
4. Ingérer la capsule avec de l'eau.

Notes

La capsule est stérilisée. Portez des gants avant de toucher la capsule. La capsule est emballée dans une boîte dont le couvercle est muni d'un aimant qui empêche toute activation accidentelle de la capsule. N'utilisez pas la capsule si elle est endommagée. N'utilisez pas la capsule si l'emballage est endommagé.

Pour l'activer, il suffit de retirer le couvercle de la boîte d'emballage, la capsule doit alors se mettre à clignoter.
Pour la désactiver, placez la capsule dans la fente, mettez le logo vers le haut, et couvrez le couvercle, cela devrait arrêter le clignotement. Si le clignotement ne s'arrête pas, faites tourner la capsule le long de l'axe et couvrez le couvercle.
Répétez ce processus jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.

Informations réglementaires



Marquage CE

IPX8

Protection contre les infiltrations: 8



Usage unique

STERILE EO

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Ecologique et recyclable



Type d'appareil BF

Pour obtenir la dernière version de ce guide d'informations importantes sur les produits, contactez votre distributeur.