



 **RC** Robotic Capsule

Guide d'informations importantes sur le produit



Chongqing Jinshan Science & Technology (Group) Co., Ltd.

Address No. 18, Nishang Road, LiangLu Industrial City
401120 Yubei District, Chongqing, China

Tel 0086-23-86098099

Website www.jinshangroup.com/en

Email service@jinshangroup.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands




Asept InMed[®]
A MEDI-GLOBE COMPANY

Imported by: Asept InMed SAS
9, Avenue Mercure 31130 Quint Fonsegrives.
Tel 05.62.57.69.00 - Fax 05.62.57.69.01
www.aseptinmed.fr



JINSHAN | Life Insights

MCE03-DY005 v1.0 Jan. 11, 2023

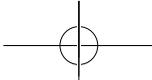

Spécification produit

Model RC12: 9h
Model RC22: 11h
Voltage: 3V===

Temperature utilisation: 5°C~40°C
Temperature stockage: 0°C~50°C
Validité: 14 mois

Indications

Applicable au public de 18 à 70 ans.
Conçu pour l'examen de l'estomac et de l'intestin grêle. Il peut également être utilisé pour visualiser les éléments suivants:
Lésions pouvant indiquer la maladie de Crohn, des saignements intestinaux, une anémie.

Contre indication et précaution

La capsule robotique OMOM RC est contre-indiquée pour une utilisation dans les conditions suivantes:
Chez les patients confirmés ou suspectés d'anomalies, d'obstruction, de perforation, de rétrécissement ou de fistule.
Chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques implantés ou d'autres dispositifs électromédicaux.
Chez les patients souffrant de dysphagie ou d'autres troubles de la déglutition.
Chez les patients atteints d'entérite aiguë ou de carence en fer sévère, par ex. dysenterie bacillaire aiguë, rectocolite hémorragique aiguë surtout avec symptômes fulgurants.
Chez les patients allergiques aux matériaux polymères.
Chez les femmes enceintes.
A utiliser avec prudence dans les conditions suivantes:
Chez les patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans.
Chez les patients confirmés ou suspectés de psychopathie.

Préparation et administration

Pour effectuer un examen de l'intestin grêle, une préparation supplémentaire de nettoyage de l'intestin est nécessaire.
La gélule doit être administrée sous la surveillance d'un médecin.

Ingestion de la capsule

Procédez comme suit lors de l'ingestion de la capsule:
1. Retirez la boîte d'emballage de l'emballage Tyvek.
2. Retirez le couvercle de la boîte d'emballage.
3. Retirez la capsule et prenez une photo du visage du patient avec l'appareil photo à capsule.
4. Ingérer la capsule avec de l'eau.

Notes

La capsule est stérilisée. Portez des gants avant de toucher la capsule.
La capsule est emballée dans une boîte dont le couvercle est muni d'un aimant qui empêche toute activation accidentelle de la capsule.
N'utilisez pas la capsule si elle est endommagée.
Ne pas utiliser la capsule si l'emballage est endommagé.
Pour l'activer, ouvrez le couvercle de l'emballage, sortez la capsule et dirigez la lentille de la capsule vers une source de lumière suffisante. Une fois que la capsule clignote, cela signifie qu'elle est activée.
Pour désactiver, si la capsule n'est pas couplée avec l'enregistreur d'images, remettez-la dans la fente et fermez le couvercle ; si le couplage est terminé, remettez la capsule dans la fente et fermez le couvercle, puis éteignez l'alimentation via la commande de veille du logiciel RCVue.

Informations réglementaires



Marquage CE

IPX8

Protection contre les infiltrations: 8



Usage unique

STERILEEO

Sterilisé à l'oxyde d'éthylène



Ecologique et recyclage



Type d'appareil BF

Pour obtenir la dernière version de ce guide d'informations importantes sur les produits, contactez votre distributeur.