

Notice d'utilisation

Identification du dispositif :

Fixation adhésive pour sondes nasales.

Dimensions : 12x4 cm

Référence : L2 / 203133

Indications :

Les fixations adhésives pour sondes nasales sont fournies à l'état non stérile, elles sont à usage unique.

Elles sont utilisées pour coller et fixer d'autres dispositifs médicaux sur des parties spécifiques du corps humain, telles que les sondes nasogastriques.

Groupe cible de patients : adultes et les enfants.

Composition :

Tissu non tissé, mousse de polyéthylène, papier de protection.

Précautions d'emploi :

1. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
2. Vérifier la date de péremption avant utilisation. Il est strictement interdit d'utiliser le produit si la date de péremption est dépassée.
3. Lors de l'utilisation, il est nécessaire de choisir une taille appropriée pour s'assurer du maintien sur la peau. Ne pas tirer sur le pansement une fois celui-ci collé pour le déplacer, ceci pourrait entraîner des lésions de la peau.

Contre-indications :

- Ne doit pas être utilisé sur une peau lésée.
- Ne doit pas rentrer en contact direct avec une plaie. Le site d'application est la peau intacte.

Conditions de stockage et de transport :

Conserver, stocker et transporter à température ambiante et dans un endroit sec.

Fréquence d'utilisation :

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation est strictement interdite.

Conditions d'élimination :

Les produits usagés doivent être éliminés dans le circuit des déchets des établissements de santé.

En cas d'incident grave survenu en lien avec le dispositif, veuillez en informer le fabricant ainsi que l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) en France).

Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :